




PRESSALIT®

Produkt	Matratze für CT 4000 und CT 4100
Produktnummer	R8487378
	VVS: 777541708 EAN: 5708590360560 HMI: 125838
Farbe	Marineblau
Produkt- beschreibung	Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 813 x 1829 mm, Abmessung der Matratze: 805 x 1820 mm, inkl. Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben sorgen dafür, dass die Matratze fest an der Pflegeliege befestigt ist - sowohl beim Hochklappen der Liegefläche als auch beim Transfer zur und von der Pflegeliege. Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 813 x 1829 mm, Abmessung der Matratze: 805 x 1820 mm, inkl. Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben sorgen dafür, dass die Matratze fest an der Pflegeliege befestigt ist - sowohl beim Hochklappen der Liegefläche als auch beim Transfer zur und von der Pflegeliege.
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Ergonomie	Der Matratze kann umgedreht werden und besteht aus einem angenehmen hypoallergenen Material mit einer Oberfläche, die leicht abzuwischen und sauber zu halten ist.
Funktionen	Der Matratze kann leicht entfernt werden, dies schafft Flexibilität bei der Verwendung und gewährleistet optimale Möglichkeiten für eine effektive Reinigung über und unter der Matratze.

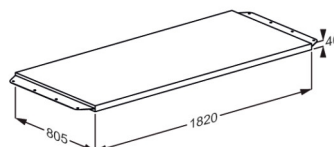



PRESSALIT®

Produkt	Matratze für CT 4000 und CT 4100
Produktnummer	R8487378
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com

PRESSALIT®