




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til vægafløb R9023000
<b>Farve</b>	VVS:617989000 NRF:6191182 EAN:5708590372839 HMI: 138237 FDA:IKX/D319729 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>SELECT toiletløftere fås i flere modeller og farver til både vægafløb eller gulvafløb. De fås i elektrisk eller manuelt højdejusterbare versioner, med eller uden sideprofiler og til almindelige toilet-kummer eller douchetoiletter. Alle udviklet med fokus på hygiejne og nem rengøring.</p> <p>SELECT TL3 toiletløfter, til vægafløb. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L (kan omstilles til 2/4L). Manuelt højderegulerbar 200 mm med håndsvingsbetjening. Toilet-kumme, toiletsæde og toiletstøtter skal bestilles separat. Materialer: Rustfrit stål og PMMA/ABS. Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Reguleringshøjde</b> <b>Produktkapacitet</b>	Højderegulerbar 200 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>
<b>Materialer</b>	Toiletløfteren er fremstillet i rustfrit stål, med afdækningskåbe i PMMA/ABS.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.




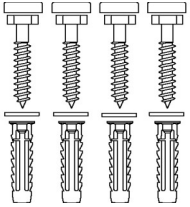
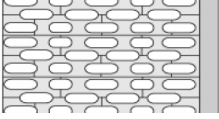
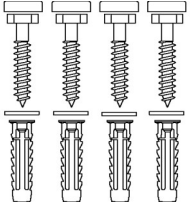
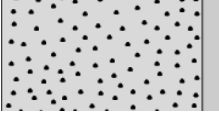
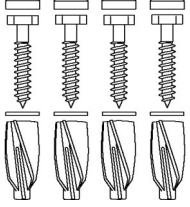
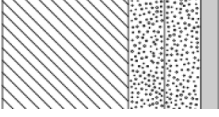
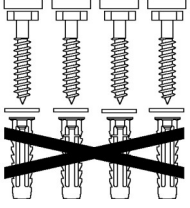


<b>Produkt</b>	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til vægafløb
<b>Varenummer</b>	R9023000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>





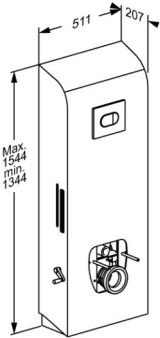


<b>Produkt</b>	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til vægfløb
<b>Varenummer</b>	R9023000

## Montering i forskellige vægtyper

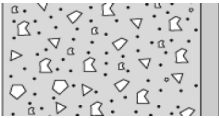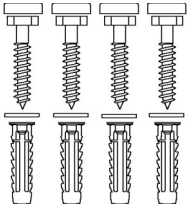	<b>Beton &gt;B25</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hz12</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

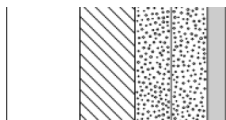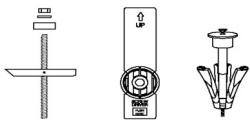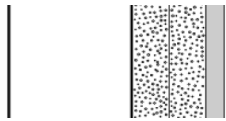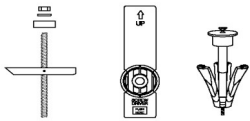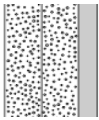

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SELECT TL3 toiletløfter, manuel, til vægfløb R9023000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	