




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	MCT 5 mobile Ankleideliege, manuell höhenverstellbar R9502719000
Farbe Produkt- beschreibung	VVS: 777542520 EAN: 5708590389875 FDA: INW/D546021 Weiß  Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. MCT 5 mobile Ankleideliege, 700 x 1900 mm, zwei umklappbare Seiten. Manuell höhenverstellbar per Fußpedal. 500 mm Hubbereich von 550 bis 1050 mm. Matratze muss separat bestellt werden.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 500 mm Maximales Anwendergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 205 kg. <i>Die Pflegeliege ist mit 307,5 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm ISO 17966, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 erfordert.</i>
Materialien	Materialien: Kunststoff, Compact Density Fiberboards (CDF) und lackierter stahl.

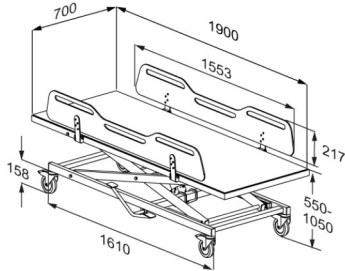

Produkt	MCT 5 mobile Ankleideliege, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R9502719000
Ergonomie	• Die ergonomisch geformten Seitengitter der mobilen Ankleideliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann. • Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens. • Die verschiedenen Griffmöglichkeiten am Seitengitter ermöglichen es dem Benutzer sich beim Wenden daran festzuhalten. Das gibt dem Benutzer Sicherheit und fördert das Wohlbefinden und die Selbständigkeit bei der Pflege im Duschwagen. • Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Funktionen	• Der Ankleideliege kann für einen einfachen Transport und mehrere Benutzer von Raum zu Raum bewegt werden. • Intuitive, benutzerfreundliche Dropdown-Seitengitter mit einhändiger Bedienmöglichkeit.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



Produkt	MCT 5 mobile Ankleideliege, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R9502719000
Reinigung	Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, das in eine milde Seifenlauge, wie z. B. Universalreiniger, getaucht und dann ausgewrungen wurde. Nach der Reinigung muss das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch abgewischt werden. Dieser Schritt ist wichtig, um die Materialien vor Verfärbungen zu schützen. Außerdem schützt dies vor einer möglichen Zersetzung der Oberflächenlackierung. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.