


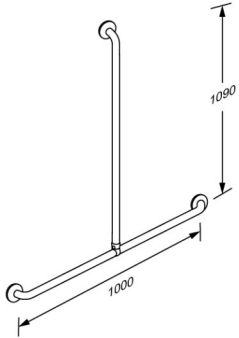

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS stödhandtag/kombination till dusch 1000 x 1090 mm RT144000
<b>Färg</b>	VVS: 777569700 NRF: 6311235 RSK: 8180962 EAN: 5708590247649 HMI: 42068 NBS: N13:436 FDA: ILS/D135866 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand.</p> <p>PLUS stödhandtag kombination till dusch, A: 1000 mm x B: 1090 mm, för fast montering. Passar till RT600 duschhållare. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringsskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
<b>Material</b>	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast. Strop: Nylon (PA).
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS stödhandtag/kombination till dusch 1000 x 1090 mm
<b>Varunummer</b>	RT144000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>








<b>Product</b>	PLUS stödhandtag/kombination till dusch 1000 x 1090 mm
<b>Varunummer</b>	RT144000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8667 - Monteringsset 12 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

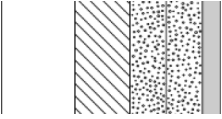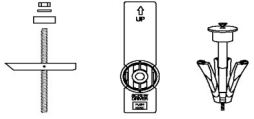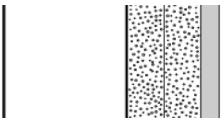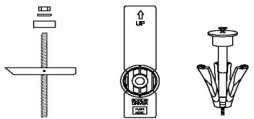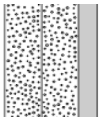

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS stödhandtag/kombination till dusch 1000 x 1090 mm RT144000	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	