


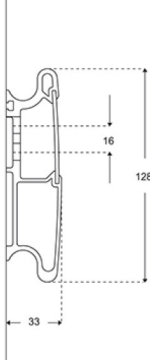

<b>Produkt</b>	PLUS vægskinne, 3900 mm
<b>Varenummer</b>	R9839112
<b>Farve</b>	Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:615841139 NRF:7501068 EAN:5708590305950 HMI: 71751</p>  <p>PLUS vægskinne, 3900 mm, til vandret montering. Vægskinnen anvendes til ophængning af toiletstøtter, brusesæder og vaskophæng, og muliggør sideværts regulering af disse produkter. Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder.</p> <p>Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring.. Ekskl. monteringskruer til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p><i>Erstatter R9912.</i></p> <p>PLUS vægskinne, 3900 mm, til vandret montering. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Fastmonteret
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: Op til 1000 kg, afhængig af væggens beskaffenhed.
<b>Materialer</b>	Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endefafdækningerne er ABS.
<b>Ergonomi</b>	Den vandrette vægskinne gør indretningen fleksibel. Gennem produkternes forflytbarhed opnås optimale betingelser både for brugeren og hjælperen, og rummet udnyttes perfekt.
<b>Funktioner</b>	Skinnen fordeler vægten af det enkelte badeværelsesprodukt over hele skinnens længde. Produkterne kan fastlåses til skinne med intuitive justerings- og låsefunktioner. Frontpladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS vægskinne, 3900 mm
<b>Varenummer</b>	R9839112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS vægskinne, 3900 mm
<b>Varenummer</b>	R9839112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®