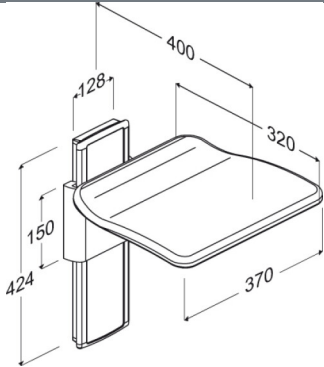




Produkt Varenummer	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5520112112
Farve	VVS: 777531212 NRF: 7501004 EAN: 5708590321349 HMI: 130158 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Sædet er opklappeligt.</p> <p>Ekskl. monteringsbolte. Klappesædet bør ikke anvendes i bruseområdet.</p> <p>PLUS klapsæde. Manuelt højderegulérbart 240 mm uden brug af værktøj. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium, hærdeplast og kunststof. Ekskl. monteringsbolte.</p>
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 240 mm Maksimal brugervægt: 265 kg. Når sædet belastes med 265 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg. <i>PLUS klapsæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer	Aluminium, hærdeplast og kunststof.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

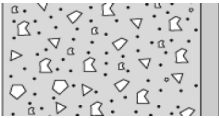
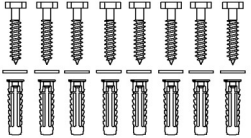

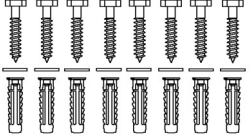
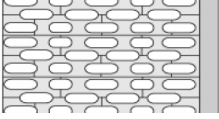
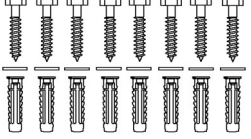
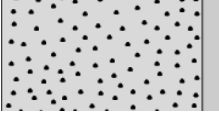
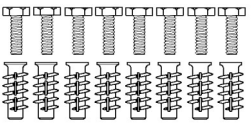
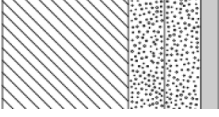
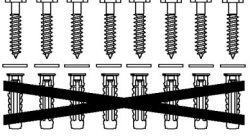


Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart
Varenummer	R5520112112
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

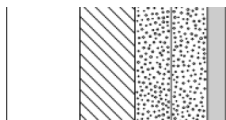
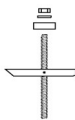

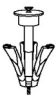
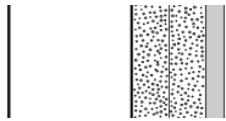
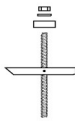


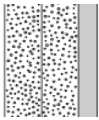


Produkt	PLUS klapsæde, manuelt højderegulerbart
Varenummer	R5520112112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8660 - Monteringssæt, 8 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8610 - Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	PLUS klapsæde, manuelt højderegulérbart R5520112112			
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.			
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.			
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (8 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	