



<b>Produkt</b>	SCT 1000 Duschliege, Festmontage
<b>Produktnummer</b>	R8406000
<b>Farbe</b>	VVS:777545340 EAN:5708590294810 HMI: 88216 NBS:N13:40,375 FDA:INT/D124320 Weiß
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen.</p> <p>Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist.</p> <p>Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>SCT 1000 Duschliege, Festmontage. Hochklappbar. Inkl. Seitengitter. Außenmaß 747 mm x 1400 mm. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b>	Festmontage
<b>Produktkapazität</b>	Maximales Benutzergewicht (MUM): 150 kg. Maximale Belastung (SWL): 150 kg. Bei einer Belastung der Duschliege mit 150 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 46 kg belastet. <i>Die Duschliege ist mit 225 kg statisch getestet gemäß den Anforderungen der Norm ISO 17966, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 erfordert.</i>
<b>Materialien</b>	Lackierter Edelstahl und PVC-beschichtete Segeltuchbespannung (phthalatfrei).
<b>Ergonomie</b>	Hochklappbar.

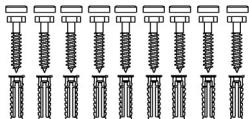
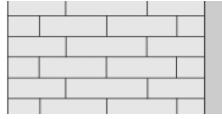
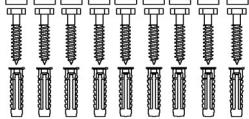
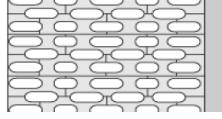
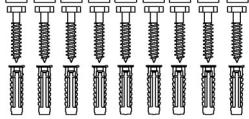
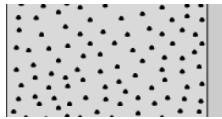
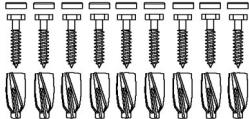
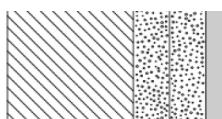
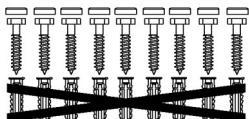


<b>Produkt</b>	SCT 1000 Duschliege, Festmontage
<b>Produktnummer</b>	R8406000
<b>Funktionen</b>	Die Duschliege kann an die Wand geklappt werden, sodass sie nur wenig Platz einnimmt, wenn sie nicht gebraucht wird. Der optionale Spritzschutzvorhang schützt den Helfer vor Spritzwasser.
<b>Garantie</b>	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Diffcil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



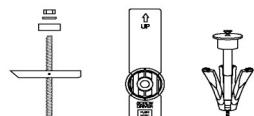
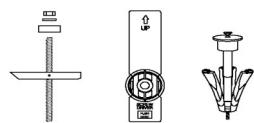
<b>Produkt</b>	SCT 1000 Duschliege, Festmontage
<b>Produktnummer</b>	R8406000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> V8611 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Sechskantschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8611 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Sechskantschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hz12</b> V8611 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Sechskantschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8661 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Bolzen M5 x 50, Dübeln FTP K 6. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8611 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schrauben Ø5 x 50, Dübeln SX8. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	 <del>8 Schrauben</del>



<b>Produkt</b>	SCT 1000 Duschliege, Festmontage
<b>Produktnummer</b>	R8406000
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (9 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (9 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.