




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	VALUE toiletsteun, 850 mm R1181000
<b>Kleur</b>	VVS:615892100 NRF:6191059 EAN:5708590373010 HMI: 138203 FDA:ILS/D135866 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>VALUE en VALUE II toiletsteunen met ALBA montage profielen, die speciaal werden ontworpen voor gebruik met de SELECT TL3 en TL4 hoog-laag toiletsystemen. De elektrische hoogteverstelling wordt geregeld met het bedieningspaneel aan de toiletsteun.</p> <p>VALUE II toiletsteun, 850 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm zonder gebruik van gereedschap (rechtsbediening). Biedt stevige ondersteuning bij zitten, staan of overstappen van en naar een toilet. Materialen: Staal met een Rilsan-coating en montageprofiel in gegoten aluminium. Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag elektrisch/handmatig toiletsysteem, ALBA-vleugel montageprofiel inbegrepen. Montage links van de gebruiker.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	150 mm
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 120 kg.
<b>Materialen</b>	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. Montageprofiel in gegoten aluminium.
<b>Ergonomy</b>	VALUE II toiletstuen met ALBA-vleugel, 850 mm, wit. Handmatig in hoogte verstelbaar, rechtshandige bediening, voor montage op TL3/TL4 (links)
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

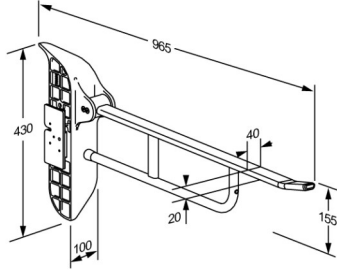

<b>Product</b>	VALUE toiletsteun, 850 mm
<b>Artikelnummer</b>	R1181000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>