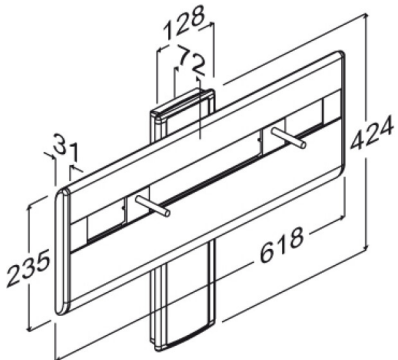




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte verstelbaar R4550112
Kleur	VVS: 654001110 NRF: 6132527 RSK: 7972586 EAN: 5708590309385 HMI: 71763 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracietgrijs
Beschrijving	 PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS wastafel muurframe. Handmatig 240 mm in hoogte verstelbaar met bedieningshendel. Aanbeveling: flexibel aan- en afvoer systeem R2061/R2065. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Antraciet Afdekplaat voor verticale wandrails. Materialen: aluminium en ABS polymeer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. Excl. bevestigingsmateriaal voor wand.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 240 mm



Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte verstelbaar R4550112
Product capaciteit	Maximale belasting: 135 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 135 kg, zal elke wandbevestiging met 57 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 135 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 151 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Materialen Ergonomy Functie	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het wastafel muurframe is geschikt voor alle soorten met bevestigingsbouten te monteren wastafels. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken. Als de hoogte van de wastafel slechts incidenteel moet worden aangepast, kan een handmatig bediend wastafel muurframe de beste oplossing zijn. Aanpassing omvat het ondersteunen van het gewicht van de wastafel en een deel van het frame. Wanneer frequente hoogteverstelling wordt verwacht, gebruikt u in plaats daarvan het wastafel muurframe met gasdrukcilinder R4650 of elektrisch bediende wastafel muurframe R475x.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



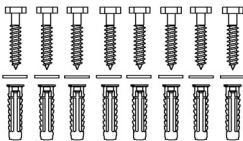
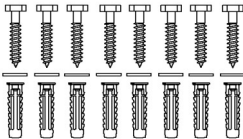
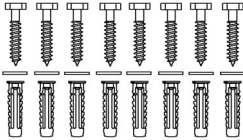
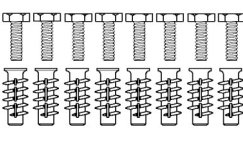
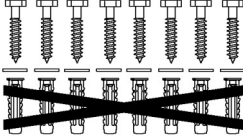
PRESSALIT®

Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4550112
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek. "
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



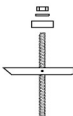
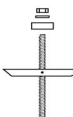
Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4550112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, handmatig in hoogte verstelbaar R4550112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 

pressalit.com