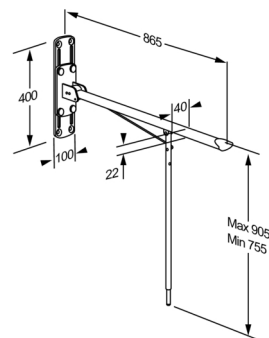




Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1111000
Farbe	VVS:615722410 NRF:6191644 RSK:7972413 EAN:5708590176437 HMI: 25414 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	Stützklappgriff mit Bodenstütze, um 150 mm höhenverstellbar. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden. Stützklappgriff mit Bodenstütze, um 150 mm höhenverstellbar. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	Maximale Belastung: 135 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 29 kg belastet.
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappen: Nylon (PA)
Ergonomie	Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen. Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.





PRESSALIT®

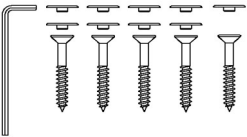
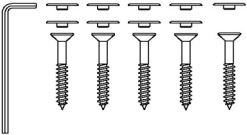
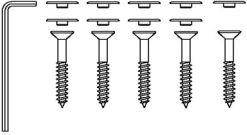
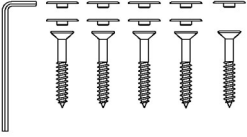
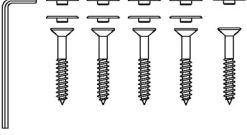
Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1111000
Funktionen	Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen. Die Bodenstütze gibt besonderen Halt. Höhenverstellbar um 145 mm.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiihto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar
Produktnummer	R1111000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar R1111000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®