


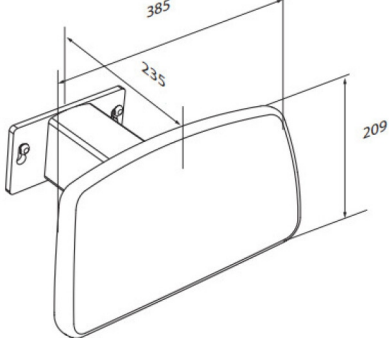

Produkt Varenummer	PLUS ryglæn, aftageligt R6409108
Farve	NRF:6317041 EAN:5708590366302 HMI: 124211 FDA:INN/D135865 Mørkeblå (RAL 5011)
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere.</p> <p>PLUS ryglæn, 385 x 209 mm, polstret. Fast højde, til montering direkte på SELECT TL1, TL2, TL3 eller TL4 toiletløfter. Aftageligt uden brug af værktøj og let at sætte på igen, når der er brug for det. Materialer: Aluminium og blødt purskum med trækerne. Monteringskit til montering på toiletløfter medfølger.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 118 kg. <i>Ryglænet skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> Ryglænet er ikke personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for ryglænet afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglænet testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.
Materialer	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS ryglæn, aftageligt
Varenummer	R6409108
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>