




PRESSALIT®

Product Varunummer	MSCT 4 mobil duschbrits, manuellt höjdglerbar R9504717000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS: 777542610 EAN: 5708590389844 HMI: 147806 FDA: INW/D546021</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdglerbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>MSCT 4 mobilt vårdbrits, 700 x 1700 mm, fyra nedfällbara sidor. Manuellt höjdglerbar med fodpedal (hydraulisk). 500 mm höjdglering från 550 till 1050 mm. Madrass måste beställas separat.</p>
Justerbar	Höjdglerbar
Höjdglering	500 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 250 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 375 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
Material	Plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat rostfritt stål.

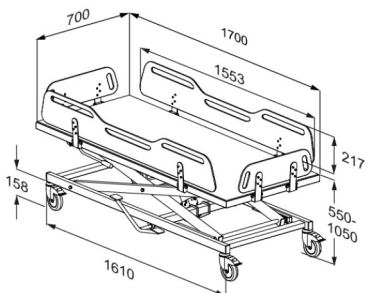

Product Varunummer	MSCT 4 mobil duschbrits, manUEllt h6jdregerbar R9504717000
Ergonomi	<ul style="list-style-type: none">• De ergonomiskt utformade s6nggrindarna har en praktisk s6nkt mittdel, vilket ger b6ttre 6tkomst och arbetsmilj6 f6r v6rdgivaren vid f6rflyttning och av -och p6kl6dning av brukare.• Enhandsgreppet f6r hantering av s6nggrindarna g6r det m6jligt f6r v6rdgivaren att h6lla 6gonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedf6llbara s6nggrindarna ger ocks6 enkel 6tkomst fr6n alla fyra sidor av duschv6rdbritsen.• De utskurna handtagen i s6nggrindarna g6r det m6jligt f6r brukaren att sj6lv hj6lpa till n6r den ska v6ndas, vilket motiverar fysisk tr6ning.• L6tt att reng6ra, med sl6ta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	<ul style="list-style-type: none">• Den mobila dusch/v6rd britsen kan enkelt flyttas fr6n rum till rum och anv6nds av flera anv6ndare. • Enkelt handhavande ger anv6ndarv6nlighet, har nedf6llbara s6nggrindar och tr6dbunden man6verdosa.
Garanti	Pressalit f6rpliktar sig att 6tg6rda material- och fabrikationsfel inom en 3-6rs period fr6n ink6psdatum. OBS Om produkten placeras i en milj6 d6r det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden fr6n 3 6r (standard) till 1 6r. Salt och klorid har en korrosiv effekt p6 komponenterna i produkten och g6r att livsl6ngden minskar.



Product	MSCT 4 mobil duschbrits, manuellt höjdregerbar
Varunummer	R9504717000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>