




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS frontstøtte, 550 - 620 mm RT874000
<b>Farve</b>	VVS:777539100 NRF:7501042 EAN:5708590314181 HMI: 124195 NBS:N13:426 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS frontstøtter fås i tre forskellige længder og flere farver, de kan bruges enten som front- eller rygstøtte.</p> <p>PLUS frontstøtte, 550 - 620 mm. Til PLUS brusesæde 450 og PLUS toiletstøtter.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: 70 kg.
<b>Materialer</b>	Stål og plast
<b>Ergonomi</b>	Stabiliserer og korrigerer bruger med nedsat kropsbalance.
<b>Funktioner</b>	For personer med fysiske handicap, især dem med begrænset overkropsstyrke/stabilitet, eller dem, der lider af ufrivillige bevægelser eller anfald, er der en meget reelle risiko for at falde fremad, ned af toilettet. I modsætning til stropper og bæltter, der kan klemme og føles ubehagelige mod huden, fastgøres disse justerbare frontstøtter direkte mellem to PLUS toiletstøtter eller mellem armlænene på et PLUS-brusersæde. Hermed holdes brugerne sikkert og komfortabelt på plads, hvilket forbedrer deres sikkerhed og bevægelighed. Samtidig hjælper de plejerne med at holde på plads og giver øget tryghed.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

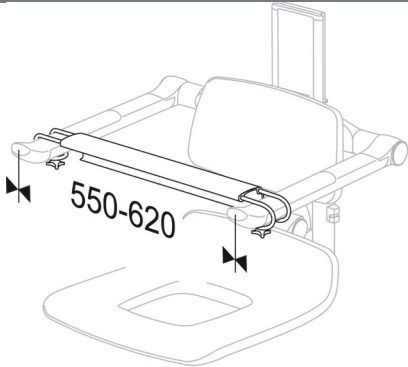

<b>Produkt</b>	PLUS frontstøtte, 550 - 620 mm
<b>Varenummer</b>	RT874000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.