




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulerbart R9632717000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777542310 EAN: 5708590389929 HMI: 139705</p>  <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>MCT 3 mobilt skifteleje, 700 x 1700 mm, to nedfældbare sider. Elektrisk højderegulerbart med håndbetjening. 500 mm højderegulering fra 450 til 950 mm. Madras skal bestilles separat. Bemærk: MCT 3 skal være tilsluttet en hovedstrømforsyning for at bruge højdejusteringsfunktionen.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 205 kg. <i>Lejet er testet statisk med 512,5 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 17 mm/s Hastighed ned: 17 mm/s
<b>Støjniveau</b>	50 dB
<b>Materialer</b>	Kunststof, Compact Density Fiberboards (CDF) og lakeret stål.

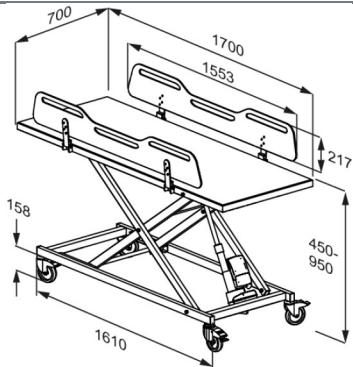

<b>Produkt</b>	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R9632717000
<b>Ergonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, skiftning og påklædning af brugeren.</li><li>• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet.</li><li>• De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når de vendes, hvilket motiverer fysisk træning.</li><li>• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.</li></ul>
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere.</li><li>• Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening.</li></ul>
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA40 (Linak) IPX6
<b>Styreboks</b>	CA30 (Linak) IPX6
<b>Håndbetjening</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 280 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



<b>Produkt</b>	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R9632717000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med en fugtig klud, der er vredet op i en mild sæbeblanding, som f.eks. et universalrengøringsmiddel. Efter rengøring er det vigtigt at aftørre produktet med en tør, blød klud. Dette trin er afgørende for at forhindre misfarvning af materialerne. Derudover er det en hjælp til at forhindre en potentiel forringelse af overfaldemalingen.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R9632717000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®