


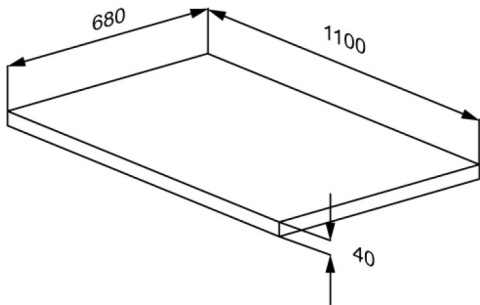

PRESSALIT®

Produkt	Matratze
Produktnummer	R8481378
	VVS: 777540928 EAN: 5708590376592 HMI: 138102
Farbe	Marineblau
Produkt- beschreibung	 <p>Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 725 x 1200 mm, Abmessung der Matratze: 680 x 1100 mm. Der Matratze kann leicht entfernt werden, dies schafft Flexibilität bei der Verwendung und gewährleistet optimale Möglichkeiten für eine effektive Reinigung über und unter der Matratze.</p> <p>Der Matratze kann umgedreht werden und besteht aus einem angenehmen hypoallergenen Material mit einer Oberfläche, die leicht abzuwischen und sauber zu halten ist.</p> <p>Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 725 x 1200 mm, Abmessung der Matratze: 680 x 1100 mm. Der Matratze kann leicht entfernt werden, dies schafft Flexibilität bei der Verwendung und gewährleistet optimale Möglichkeiten für eine effektive Reinigung über und unter der Matratze.</p> <p>Der Matratze kann umgedreht werden und besteht aus einem angenehmen hypoallergenen Material mit einer Oberfläche, die leicht abzuwischen und sauber zu halten ist.</p>
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.



PRESSALIT®

Produkt	Matratze
Produktnummer	R8481378
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättspit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>

pressalit.com

PRESSALIT®