


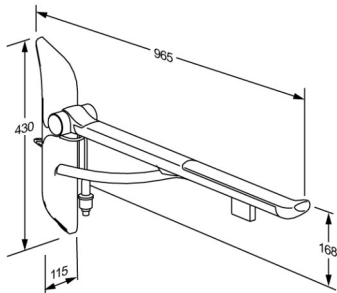

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad R372585112
<b>Färg</b>	VVS:615878212 NRF:6191143 EAN:5708590368689 HMI: 138174 FDA:ILS/D135866 Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Kan endast användas med smal toalettlyftar. Passar en vägghängd toalett där avståndet från bakkanten till framsidan på toaletten är 700 mm.</p> <p>PLUS toalettarmstöd med manöverpanel och fjäderbelastning, 850 mm. Höjddreglerbart 150 mm. Uppfällbart. Vänster hand manövrerad Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Kan endast användas med TL3/TL4 toalettlyftar. Monteringsprofil medföljer. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b>	Höjddreglerbar 150 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: 150 kg.
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål. Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig. Toalettstödet undersida är utformad för montering av olika tillbehör.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



<b>Product</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand
<b>Varunummer</b>	manövrerad R372585112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>WEEE</b>	<p>Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.</p> <p><b>Avsedd användning</b> Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.</p> <p><b>Användningsmiljö</b> För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad
<b>Varunummer</b>	R372585112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®

17. juni 2026