


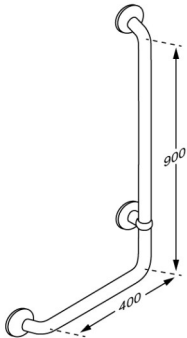

Product Varunummer	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm RT118000
Färg	VVS:777567600 NRF:6311219 RSK:8980568 EAN:5708590146294 HMI: 25433 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Vit
Beskrivning	 <p>PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand.</p> <p>PLUS stödhandtag, vinkel 90°, höger, diameter 33 mm, A:400 mm x B:900 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
Produktkapacitet	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
Material Ergonomi	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycloy-plast. Strop: Nylon (PA). Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp. Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.





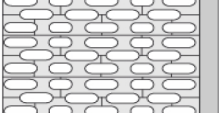

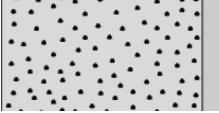

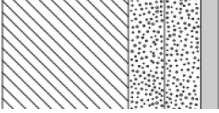



Product	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm
Varunummer	RT118000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> <p>Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3449/0/Pdf</p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras</p>








Product	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm
Varunummer	RT118000

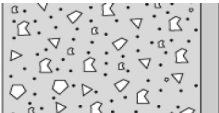Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8667 - Monteringsset 12 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8617 - Monteringsset 12 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

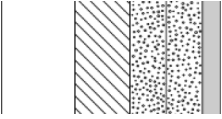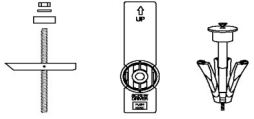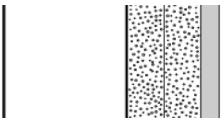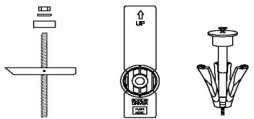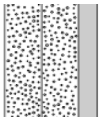

Product Varunummer	PLUS 90° vinkel stödhandtag 400 x 900 mm RT118000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (12 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 