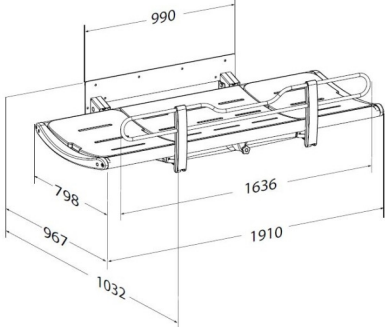




PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, fast höjd R8435318301
Färg	VVS: 777543193 RSK: 8565079 EAN: 5708590374048 HMI: 130171 FDA: INT/D124320 Grafitgrå (RAL 7024)
Beskrivning	 Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. SCT 3000-serien har en snygg och prisbelönt design med fokus på komfort och användarvänlighet. SCT 3000 duschbrits, fast höjd. Uppfällbar. Inkl. sänggridd, avloppsslang (Ø32 mm) och vattenuppsamlingskar med integrerat avlopp. Innermått 1 800 mm, utvändiga mått: 1 032 mm x 1 910 mm. Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal användarvikt (MUM): 200 kg. Maximal belastning (SWL): 210 kg. Vid 200 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 60 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 315 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
Material	Pulverlackat rostfritt stål, aluminium, plast (PVC, polystyren). Kuddar i polyuretanskum, är testade enligt standarden DIN EN 1021-1 (flamskydd).



Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, fast höjd R8435318301
Ergonomi	• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	Vattenuppsamlingskar med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta. Slangen (Ø32 mm) från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till avloppet i golv eller vägg. Liggplatsens svagt böjda form medverkar till optimal liggkomfort och säkerhet. Justerbart ryggstöd som kan flyttas till valfri sida av britsen. Sänggrinden är enkel att fälla upp/ner. Den integrerade gascylindern gör det lätt att fälla upp liggplatsen så att den bara upptar minimalt med plats när den inte används.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



PRESSALIT®

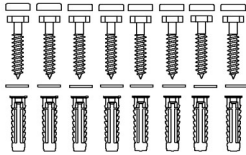
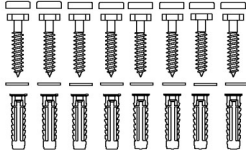
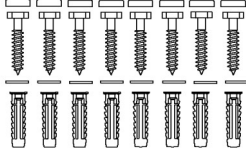
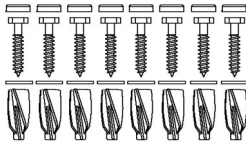
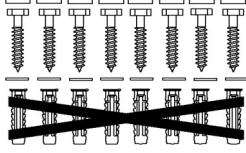
Product	SCT 3000 duschbrits, fast höjd
Varunummer	R8435318301
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

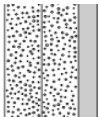
Product	SCT 3000 duschbrits, fast höjd
Varunummer	R8435318301

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8613 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8613 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8613 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8663 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8613 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, fast höjd R8435318301
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (10 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®