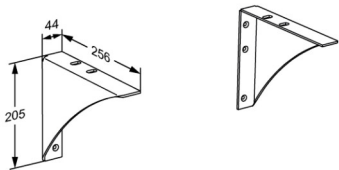




PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| Product Varunummer | MATRIX konsoler till tvättställ, fast höjd R2010182 |
| Färg | VVS:636858800 NRF:6132553 EAN:5708590329338 HMI: 106241 NBS:N13:30,335 Ljusgrå |
| Beskrivning |  <p>MATRIX –konsol upphängning är den prisvärda lösningen för MATRIX MEDIUM- och ANGLE-tvättställ. De finns i en permanent monterad version och i en manuellt höjjusterbar version som är lämplig där inga dagliga höjjusteringar behövs.</p> <p>Fasta konsoler i set om 2 st till tvättställ R2120/1 och R204x. Exkl. monteringskruvar.</p> |
| Justerbar Produktkapacitet | Fast höjd Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning (SWL): 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 75 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.</i> |
| Material | Pulverlackerat rostfritt stål |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |

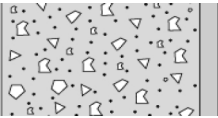
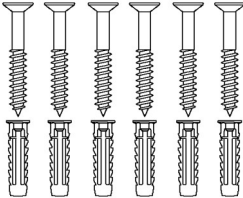

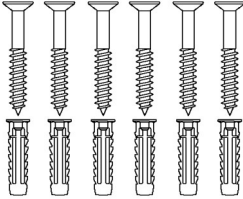
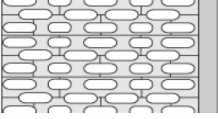
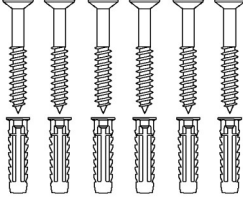
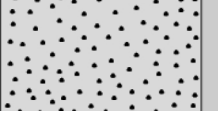

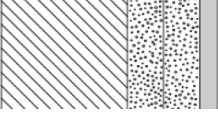
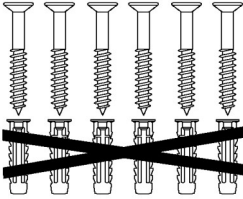


| | |
|-------------------|---|
| Product | MATRIX konsoler till tvättställ, fast höjd |
| Varunummer | R2010182 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggnigen kan uppstå.</p> |

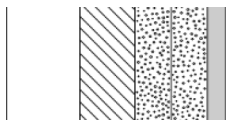

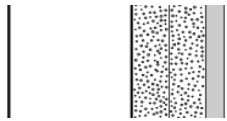

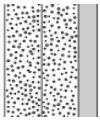



| | |
|-------------------|--|
| Product | MATRIX konsoler till tvättställ, fast höjd |
| Varunummer | R2010182 |

Montage i olika väggtyper

| | | |
|---|---|---|
|  | Betong >B25 V8600 - Monteringsset 6 st. Ø6 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Mursten >= Mz12 V8600 - Monteringsset 6 st. Ø6 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Cementsten >= Hlz12 V8600 - Monteringsset 6 st. Ø6 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat. |  |
|  | Lättbetong P4 It is not recommended to install this product in aerated concrete. |  |
|  | Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8600 - Monteringsset 6 st. Ø6 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat. |  |



| | | |
|---|--|---|
| Product Varunummer | MATRIX konsoler till tvättställ, fast höjd R2010182 | |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. |  |
|  | Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. |  |
|  | Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. |  |

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.