


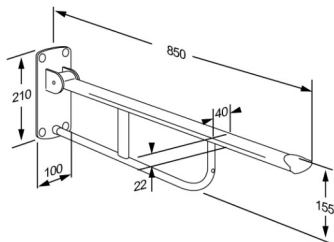

PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, Festmontage R1100000
Farbe	VVS:615722300 NRF:6191642 RSK:7972410 EAN:5708590176406 HMI: 25411 NBS:N13:436 DB: 2076622 FDA:ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	 VALUE Stützklappgriff, zur Festmontage, hochklappbar, Ausladung 850 mm. Das ergonomische Design sorgt für einen festen und angenehmen Halt sowie ein gutes Gefühl davon, wo die Stütze endet. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, druckgegossenes Aluminium, Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastung: 120 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 120 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 145 kg belastet.
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappen: Nylon (PA)
Ergonomie	Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen. Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt.
Funktionen	Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff, Festmontage
Produktnummer	R1100000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Stützklappgriff, Festmontage
Produktnummer	R1100000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8593 - 4 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigefügt. Dübeln müssen separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Stützklappgriff, Festmontage R1100000		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.

pressalit.com