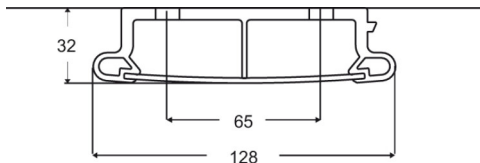




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS vægskinne med hak, 210 mm. Til højrehåndsbetjente toiletstøtter R9862112
Farve	VVS:615842102 EAN:5708590352299 Antracitgrå 
Produktbeskrivelse	PLUS vægskinne, med hak, til lodret montering, 210 mm. Til højderegulérbare, højrehåndsbetjente toiletstøtter. Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Ekskl. monteringsbolte. Se Teknisk datablad (Downloads) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. PLUS vægskinne, med hak, til lodret montering, 210 mm. Til højderegulérbare, højrehåndsbetjente toiletstøtter. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer Ergonomi Funktioner	Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er polystyren og endeaafdækningerne er ABS. Den lodrette skinne gør det muligt at justere produkternes højde. I miljøer med skiftende brugere gør skinnen det let at tilpasse indretningen til den enkelte brugers specifikke behov - uden bygningsmæssige indgreb. Kombineres den vandrette skinne med den lodrette skinne, kan pladsen i badeværelset udnyttes optimalt.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

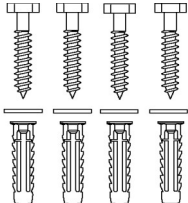
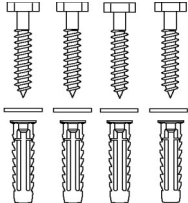
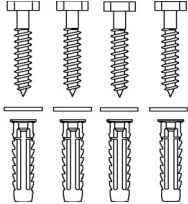
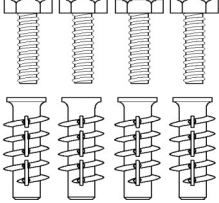
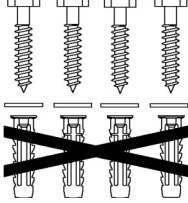
Produkt	PLUS vægskinne med hak, 210 mm. Til højrehåndsbetjente toiletstøtter
Varenummer	R9862112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vægskinne med hak, 210 mm. Til højrehåndsbetjente toiletstøtter
Varenummer	R9862112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	PLUS vægskinne med hak, 210 mm. Til højrehåndsbetjente toiletstøtter R9862112		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.