




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel R1083000
Farve	VVS:615892302 NRF:6191055 RSK:7828177 EAN:5708590346854 HMI: 138195 FDA: ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 VALUE og VALUE II toiletstøtter med ALBA-vinge-monteringsprofil er specielt designet til anvendelse sammen med SELECT TL3 og TL4 toiletløftere. Højderegulering af den elektriske toiletløfter foretages ved hjælp af betjeningspanel som medfølger toiletstøtten. VALUE toiletstøtte, inkl. betjeningspanel til TL3/TL4 toiletløfter, 850 mm, opklappelig, højderegulerbar 150 mm uden brug af værktøj (venstrehåndsbetjent). En god hjælp, når man sidder, står, eller skal forflytte sig ved toilettet. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium, endeprop i nylon (PA). Til eftermontering på TL3/TL4 elektrisk toiletløfter, ALBA-vinge-monteringsprofil medfølger. Monteres til højre for bruger.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulerbar 150 mm Maksimal belastning: 120 kg.
Materialer	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepropperne er fremstillet af nylon (PA).
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

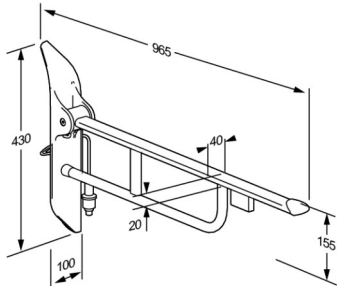

Produkt	VALUE toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel
Varenummer	R1083000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

WEEE



PRESSALIT®

Produkt	VALUE toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel
Varenummer	R1083000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

13. juli 2026