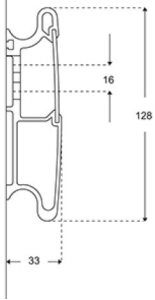




PRESSALIT®

Produkt	PLUS vægskinne, 1800 mm
Varenummer	R9818112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	VVS:615841118 NRF:7501017 EAN:5708590305813 HMI: 71743  PLUS vægskinne, 1800 mm, til vandret montering. Vægskinnen anvendes til ophængning af toiletstøtter, brusesæder og vaskophæng, og muliggør sideværts regulering af disse produkter. Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring.. Ekskl. monteringskruer til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. <i>Erstatter R9905.</i> PLUS vægskinne, 1800 mm, til vandret montering. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringskruer til væg.
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal belastning: Op til 1000 kg, afhængig af væggens beskaffenhed.
Materialer	Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endefafdækningerne er ABS.
Ergonomi	Den vandrette vægskinne gør indretningen fleksibel. Gennem produkternes forflytbarhed opnås optimale betingelser både for brugeren og hjælperen, og rummet udnyttes perfekt.
Funktioner	Skinnen fordeler vægten af det enkelte badeværelsesprodukt over hele skinnens længde. Produkterne kan fastlåses til skinne med intuitive justerings- og låsefunktioner. Frontpladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

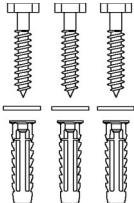
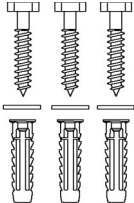
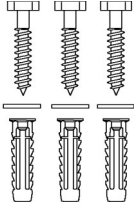
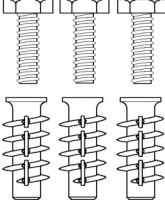
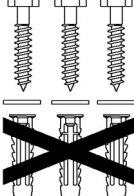
Produkt	PLUS vægskinne, 1800 mm
Varenummer	R9818112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vægskinne, 1800 mm
Varenummer	R9818112

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8620 - Monteringssæt, 3 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8670 - Monteringssæt, 3 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8620 - Monteringssæt, 6 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vægskinne, 1800 mm
Varenummer	R9818112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

30. juli 2026