


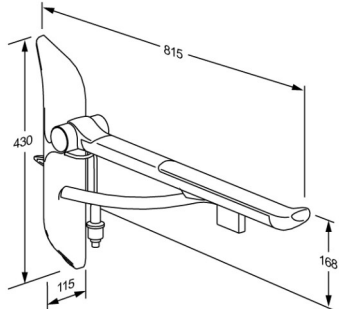

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad R372570112
Färg	VVS:615878112 NRF:6191139 EAN:5708590368658 HMI: 138184 FDA:ILS/D135866 Antracitgrå
Beskrivning	 <p>Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Kan endast användas med smal toalettlyftar. Passar en vägghängd toalett där avståndet från bakkanten till framsidan på toaletten är 540/550 mm.</p> <p>PLUS toalettarmstöd med manöverpanel och fjäderbelastning, 700 mm. Höjddreglerbart 150 mm. Uppfällbart. Vänster hand manövrerad Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Kan endast användas med TL3/TL4 toalettlyftar. Monteringsprofil medföljer. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast.</p>
Justerbar Höjjustering	Höjddreglerbar 150 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg.
Material Ergonomi Funktioner	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål. Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig. Toalettstödet undersida är utformad för montering av olika tillbehör.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



Product	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, med manöverpanel, vänster hand
Varunummer	manövrerad R372570112
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
WEEE	<p>Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.</p> <p>Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.</p> <p>Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i></p> <p>För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads".</p>



PRESSALIT®

Product	PLUS toalettarmstöd, 700 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad
Varunummer	R372570112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

17. juni 2026