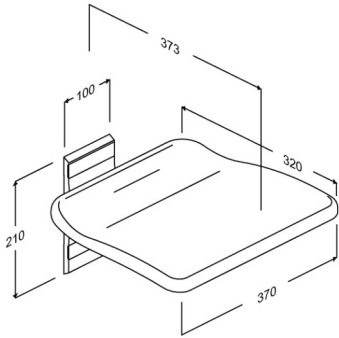




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte R5510000
Kleur	VVS:777531000 NRF:7501001 RSK:7973939 EAN:5708590306339 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Wit
Beschrijving	 De zitting is geschikt voor situaties waarin extra zitplaatsen vereist zijn en de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld in keukens, liften en corridors op luchthavens. Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche. PLUS opklapbaar zitje. Voor vaste montage. Materialen: aluminium, duroplast kunststof, kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 435 kg. Wanneer de zitting is belast met 435 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 199 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Materialen Ergonomy Functie	De opklapbare zitting is gemaakt van duroplast kunststof en de montage-en ophangbeugel zijn gemaakt van 10 mmgeanodiseerd aluminium. De uiteinden zijn gemaakt van ABS-kunststof. Ergonomisch gevormde zitting, die een goede en comfortabele ondersteuning biedt. De zitting kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is, of om ruimte vrij te maken.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

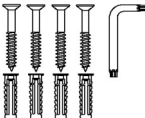
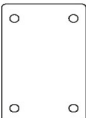
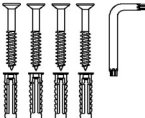
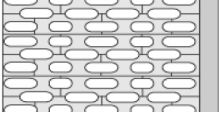
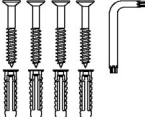
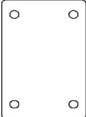
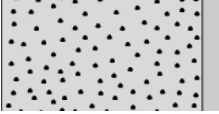
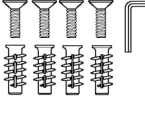
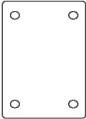
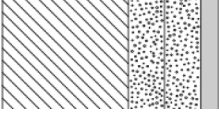
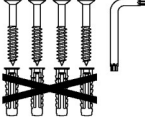
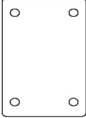
Product	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte
Artikelnummer	R5510000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.



PRESSALIT®

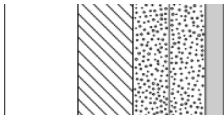
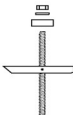
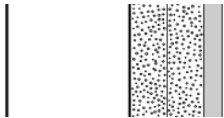
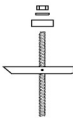
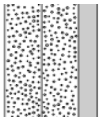
Product	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte
Artikelnummer	R5510000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	 
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	 
	Kalksteen>=Hlz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	 
	Gasbeton P4 V8654 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	 



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte R5510000		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		

pressalit.com