




# PRESSALIT®

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                   | SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Wandablauf<br>R8222112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Farbe</b>                                                             | VVS:617995012<br>NRF:6191035<br>EAN:5708590341491<br>HMI: 105973<br>FDA: IKX/D319729<br>Anthrazitgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>                                         |  <p>Es geht um die tägliche WC-Benutzung. Und darum, das Hinsetzen und Aufstehen so leicht wie möglich zu machen. Es geht darum, den Helfern die Arbeit zu erleichtern und den Benutzern einen bequemen und würdevollen WC-Besuch zu ermöglichen.</p> <p>SELECT TL1 WC-Lifter, um 400 mm elektrischen höhenverstellbar mit kabelgebundener Fernbedienung.<br/>Inkl. eingebauter Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 Liter.<br/>WC-Keramik und Toilettensitz müssen separat bestellt werden.<br/>Für Wandablauf geeignet.<br/>Material: Aluminium eloxiert und Polystyrol (PS).<br/>Exkl. Wandbefestigungen.<br/>Entspricht der DIN-Norm 18040-1.</p> |
| <b>Verstellung</b><br><b>Höhenverstellung</b><br><b>Produktkapazität</b> | Höhenverstellbar<br>400 mm<br><br>Maximales Anwendergewicht: 200 kg.<br>Maximale Belastung: 235 kg (Anwender + Zubehör).<br>Bei einer Belastung des WC-Lifters mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 65 kg belastet.<br><i>Der WC-Lifter wurde statisch mit einer Belastung von 600 kg, an der Montagestelle der Toilette, getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen. Bitte beachten Sie, dass die meisten Toiletten, die am WC-Lifter montiert werden können, auf 400 kg getestet wurden.</i>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b><br><b>Geräusch</b>                        | Geschwindigkeit aufwärts: 12 mm/s<br>Geschwindigkeit abwärts: 12 mm/s<br><br>48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

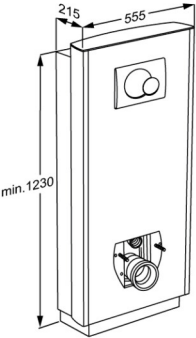

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                         | SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Wandablauf                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktnummer</b>                   | R8222112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materialien</b>                     | Eloxiertes Aluminium.<br>Die Frontplatte bestehen aus einem Thermoplast Kunststoff (Polystyrol).>br>Abdeckplatte aus Kompaktlaminat mit Aluminium Dekor.<br><i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1 und ISO 8191-2). Testbericht verfügbar.</i>                                                                                |
| <b>Ergonomie</b>                       | Unsere WC-Lifter gibt es in drei verschiedenen Farben, die mit modernen Bädern harmonisieren und zu einem freundlichen, behaglichen Ambiente in Bad und WC beitragen.<br>Abgerundete Ecken und Kanten machen das Reinigen einfach und schnell – keine verdeckten Falze oder Vertiefungen, in denen sich Schmutz sammeln kann. |
| <b>Funktionen</b>                      | Der WC-Lifter verfügt über eine kabelgebundene Fernbedienung, mit der Benutzer und Helfer leicht die Höhe verstellen können.<br>Die Sitzhöhe ist um 400 mm verstellbar, von 425 bis 825 mm – auch während der Benutzer auf dem WC sitzt.                                                                                      |
| <b>Stromanschluss (V)</b>              | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Motor</b>                           | LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Steuerkasten</b>                    | CB9 Careline, (Linak), IPX6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>   | HB7, (Linak) IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b> | Stromverbrauch, maximal Belastung: 70 W<br>Stromverbrauch, standby: 2 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                   |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Wandablauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktnummer</b> | R8222112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b><br/>Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> |
| <b>WEEE</b>          | <p>Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





PRESSALIT®

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Wandablauf |
| <b>Produktnummer</b> | R8222112                                 |

## Montage in verschiedenen Wandtypen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung.<br>Muss separat bestellt werden.                                                                                                                                       |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung.<br>Muss separat bestellt werden.                                                                                                                               |   |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung.<br>Muss separat bestellt werden.                                                                                                                       |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung.<br>Muss separat bestellt werden.                                                                                                                                       |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b><br>V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br>Muss separat bestellt werden. |  |

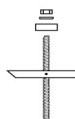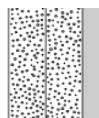

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                                              | SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Wandablauf<br>R8222112                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |  |    |  |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |  |    |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.                                                        |                                                                                     |  |                                                                                     |

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.