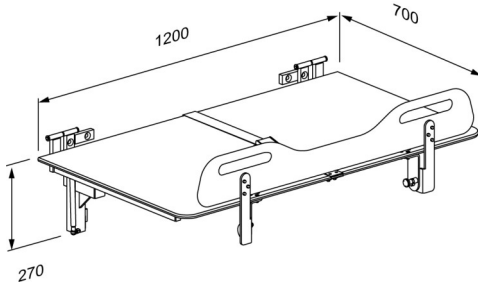




PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 5000 vårdbrits, fast höjd R8455512000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS: 777540820 EAN: 5708590376585 HMI: 138135 FDA: INT/D124320</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>CT 5000 vårdbrits, liggyta i kompakt laminat, 700 x 1 200 mm , vit. Med sänggrind och kroppsbälte, uppfällbar, fast höjd, vägghängda.</p>
Justerbar Höjdjustering	Fast höjd 0 mm
Produktkapacitet	<p>Maximal användarvikt (MUM): 150 kg. Maximal belastning (SWL): 150 kg. Vid 150 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 52 kg.</p> <p><i>Britsen har testats statistiskt med 225 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i></p>
Material	Pulver-lackerat stål, liggyta i Compact Density Fiberboards (CDF).

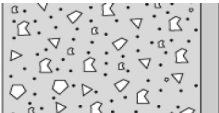
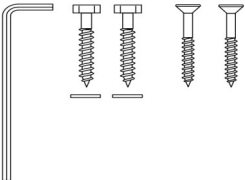

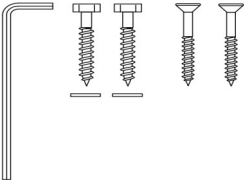
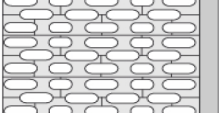
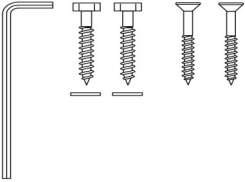
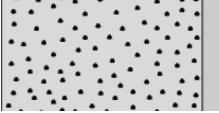
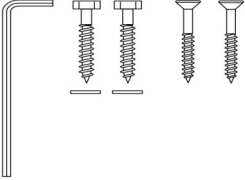
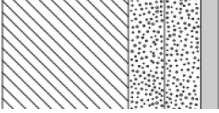
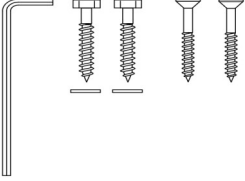


Product Varunummer	CT 5000 vårdbrits, fast höjd R8455512000
Ergonomi	<p>Den ergonomiskt utformade sänggrind har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av- och påklädning av brukare.</p> <p>Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.</p>
Funktioner	Vårdbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

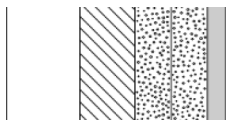

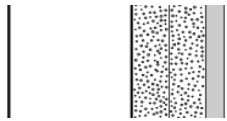

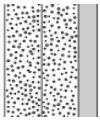



Product	CT 5000 vådrbrits, fast höjd
Varunummer	R8455512000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Mursten >= Mz12 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Cementsten >= Hlz12 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Lättbetong P4 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	



Product Varunummer	CT 5000 vårdbrits, fast höjd R8455512000	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

Inkl. skruvar till vägg. Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekta pluggs användas. Se monteringsanvisning.