




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdreglerbar och sido reglerbar R4580112
Färg	VVS: 654001510 NRF: 6132529 RSK: 7972588 EAN: 5708590309415 HMI: 71758 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjdjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS upphängning till tvättställ, manuell höjdreglerbart 240 mm, antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065/R2067. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 240 mm Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 30 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 151 kg belastar tvättstället.</i>

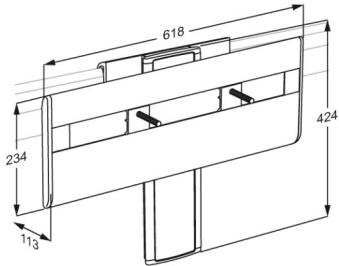

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjddreglerbar och sido reglerbar R4580112
Funktioner	Viktigt ! Ej avsedd för daglig höjjustering. Vid daglig höjjustering rekommenderas gasdriven upphängning R4680 eller eldriven upphängning R478x.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjddreglerbar och sido reglerbar
Varunummer	R4580112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®