




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 3000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar R8582318301
Farve	VVS: 777543493 RSK: 8565083 EAN: 5708590374123 HMI: 130164 Grafitgrå (RAL 7024)
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 3000 serien har et stilfuldt og prisbelønnet design med fokus på komfort og brugervenlighed. SCT 3000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Opklappelig. Inkl. sengehest, afløbsslange (Ø32 mm) og vandopsamlingsbakke med integreret afløb.
Udvendige mål: 1057 mm x 1910 mm. Ekskl. monteringskraver til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 700 mm Maksimal brugervægt (MUM): 227 kg. Maksimal belastning (SWL): 237 kg. Når briksen belastes med 227 kg, belastes hver monteringsbolt med 29,5 kg <i>Briksen er testet statisk med 592,5 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i>

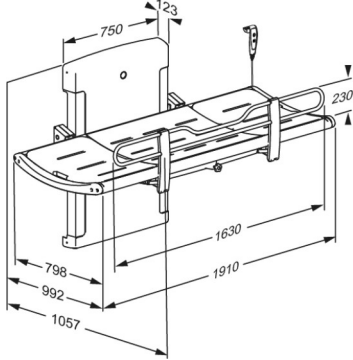

Produkt	SCT 3000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8582318301
Hastighed opad	Hastighed op: 15 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, aluminium, kunststof (PVC, polystyren). Puder i polyuretanskum, er testet i henhold til standarden DIN EN 1021-1 (flammebestandighed).
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen (Ø32 mm) fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. • Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed. • Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender. • Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. • Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". • Håndbetjeningen leveres med en praktisk holder til placering på væg.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Styreboks	CA63 Careline (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 420 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



Produkt	SCT 3000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8582318301
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.




PRESSALIT®

Produkt	SCT 3000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8582318301

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

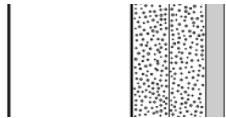

Produkt Varenummer	SCT 3000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar R8582318301
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.