




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS ryglæn til fastmontering R6304112
<b>Farve</b>	VVS: 777538112 NRF: 6317028 EAN: 5708590365336 HMI: 124221 FDA: INN/D135865 Antracitgrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>PLUS ryglæn fås i flere farver og versioner, de fås både som fastmonterede og regulérbare. De er velegnede til brug bag et væghængt toilet uden cisterne eller til montering på en af Pressalits toiletløftere.</p> <p>PLUS ryglæn, 293 x 186 mm, polstret. Fast højde, til montering direkte på væg bag et væghængt toilet uden cisterne. Materialer: Aluminium og blødt purskum med trækerne. Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fastmonteret  Maksimal belastning: 50 kg. Maksimal brugervægt: 100 kg. Når ryglænet belastes med 50 kg, belastes hver vægmonterings skrue med 59 kg. <i>Ryglæn skal kunne bære vægten af en person der støtter sig til det.</i> <b>Ryglæn er ikke personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for ryglæn afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at ryglæn testes statisk med 50% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et ryglæn er 50 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 100 kg støtter sig til ryglænet.</b>
<b>Materialer</b> <b>Funktioner</b>	Ryglænet er fremstillet i PUR-skum og er overtrukket med en klar overfladelak i PUR.  Til toilet uden cisterne
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

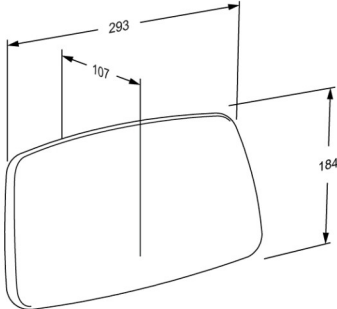

<b>Produkt</b>	PLUS ryglæn til fastmontering
<b>Varenummer</b>	R6304112
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en antibakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p><b>Forventet levetid:</b> 10 år. <b>Kontraindikationer for brug:</b> Det anbefales ikke at personer, der har brug for at ligge ned ved toiletbesøg, forsøger at bruge ryglænet til at støtte sig ved.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS ryglæn til fastmontering
<b>Varenummer</b>	R6304112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®