



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm RT873112
Farve Produktbeskrivelse	VVS:777539012 NRF:7501041 EAN:5708590319360 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Antracitgrå  PLUS frontstøtter fås i tre forskellige længder og flere farver, de kan bruges enten som front- eller rygstøtte. PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm. Til PLUS brusesæde 310 og PLUS toiletstøtter
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 70 kg.
Materialer Ergonomi Funktioner	Stål og plast Stabiliserer og korrigerer bruger med nedsat kropsbalance. For personer med fysiske handicap, især dem med begrænset overkropsstyrke/stabilitet, eller dem, der lider af ufrivillige bevægelser eller anfald, er der en meget reel risiko for at falde fremad, ned af toilettet. I modsætning til stropper og bæltter, der kan klemme og føles ubehagelige mod huden, fastgøres disse justerbare frontstøtter direkte mellem to PLUS toiletstøtter eller mellem armlænene på et PLUS-brusersæde. Hermed holdes brugerne sikkert og komfortabelt på plads, hvilket forbedrer deres sikkerhed og bevægelighed. Samtidig hjælper de plejerne med at holde på plads og giver øget tryghed.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl.



Produkt	PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm
Varenummer	RT873112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.