




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8584572000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777541100 RSK: 8565085 EAN: 5708590358130 HMI: 125834</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar. Elektrisch in hoogte verstelbaar 700 mm; van 300 mm tot 1000 mm, met knoppen die geplaatst zijn aan de voorzijde van de tafel. Inclusief veiligheidsrek, lichaamsgordel en afstandbediening aan kabel. Ligvlak 813 x 1829 mm in compact laminaat. Buitenmaten 1008 mm x 1829 mm. Exclusief bevestigingsset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	700 mm
<b>Product capaciteit</b>	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 227 kg. Maximale belasting (SWL): 232 kg. Wanneer de tafel belast is met 227 kg, is elke wandbevestiging belast met 37,5kg.
<b>Opwaartse snelheid</b>	<i>Dit product is statisch getest met een belasting van 580 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.</i> Speed up mm: 15 mm/s Speed down mm: 20 mm/s

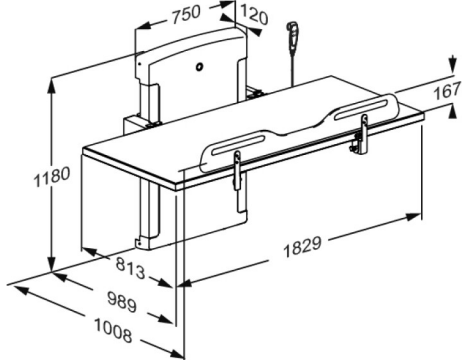

<b>Product</b>	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R8584572000
<b>Noise level</b>	48 dB
<b>Materialen</b>	Poedergelakt roestvrijstaal, ligvlak in Compact Density Fiberboards (CDF).
<b>Ergonomy</b>	<p>De ergonomisch ontworpen veiligheidsrail hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, douchen, drogen, verschonen en aankleden van de gebruiker.</p> <p>Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.</p>
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Actuator (motor)</b>	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
<b>Control box</b>	CA63 Careline (Linak), IPX6
<b>Wired remote control</b>	HB30 (Linak) IP66
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	Power consumption by maximum load: 420 W Power consumption by standby: 2 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.




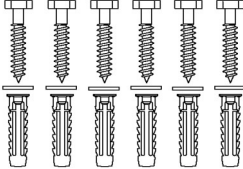
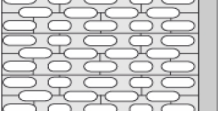
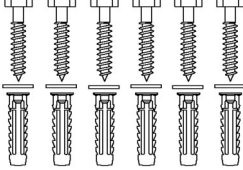
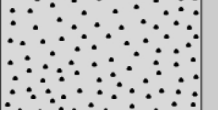
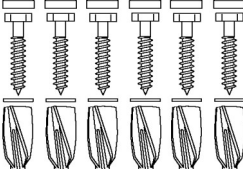
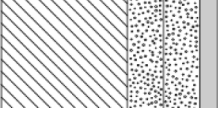
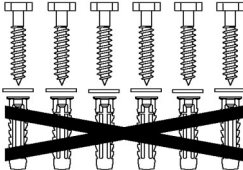


<b>Product</b>	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R8584572000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
<b>WEEE</b>	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>









<b>Product</b>	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar.
<b>Artikelnummer</b>	R8584572000

## Installatie in verschillende wandtypes

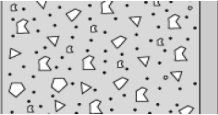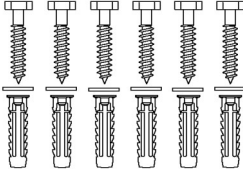	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8608 - Bevestigingsmateriaal, 6 schroeven Ø10 x 70 - pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

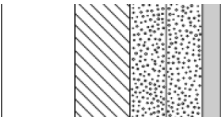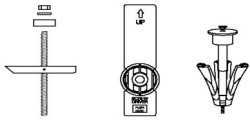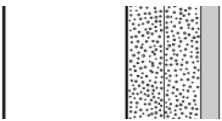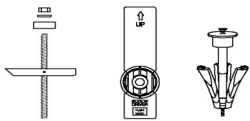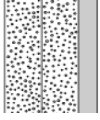

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	CT 4000 aankleedtafel, handmatig opklapbaar, elektrisch in hoogte verstelbaar. R8584572000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (6 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.