


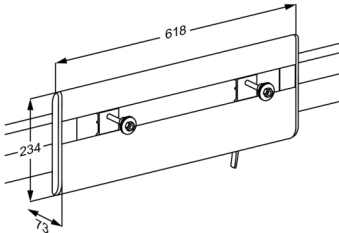

Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng, manuelt sideværts regulérbart R4560
Farve	VVS:654001300 NRF:6132444 EAN:5708590309408 HMI: 106242 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Lysegrå
Produktbeskrivelse	 PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulerbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS vaskophæng. Sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2064/R2065/R2067. Materialer: Aluminium og kunststof. Til eftermontering på vandret vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Produktkapacitet	Sideværts regulérbar Maksimal belastning: 135 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 97 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 135 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 151 kg støtter sig til vasken.
Materialer Ergonomi	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS. Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vaskophæng, manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R4560
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vaskophæng, manuelt sideværts regulérbart
Varenummer	R4560

pressalit.com