



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS dossier, pour montage fixe R6408112
Couleur	VVS:777530312 NRF:6317037 EAN:5708590365428 HMI: 124218 FDA:INN/D135865 Gris anthracite
Description	 PLUS dossiers sont disponibles en différentes couleurs et versions ; hauteur fixe ou réglable. Les dossiers peuvent être montés directement sur le mur derrière une toilette sans réservoir ou sur l'ensembles wc de Pressalit. PLUS dossier, 385 x 209 mm, rembourré. Hauteur fixe, montage sur SELECT TL1, TL2, TL3 ou TL4 ensembles WC. Matériaux : aluminium et mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour montage sur SELECT ensemble de WC, vis de montage incluses.
Réglage Capacité du produit	Montage fixe Charge maximale admissible : 50 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg. Lorsque le dossier est chargé de 50 kg, chaque vis de montage est chargé de 118 kg. <i>Le dossier doit être en mesure de supporter le poids d'une personne s'appuyant dessus.</i> <i>Le dossier n'est pas conçu pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au dossier reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le dossier chargé à 50% du poids maximal de l'utilisateur.</i> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 50 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 100 kg qui se pencherait sur le dossier.</i>
Matériaux	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	PLUS dossier, pour montage fixe
Numéro article	R6408112
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.