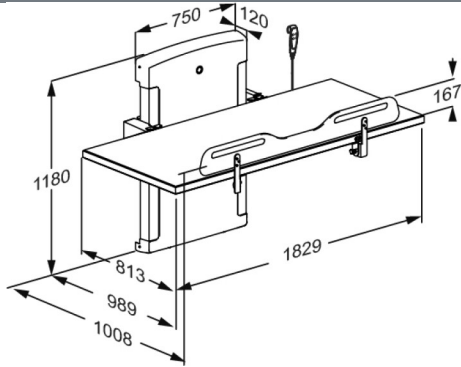




PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar R8584572000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777541100 RSK: 8565085 EAN: 5708590358130 HMI: 125834  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbart. Elektrisk höjdreglerbart 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med tryckknappar i framkant. Inkl. sänggrind, kroppsbälte och manöverdosa. Liggyta 813 x 1 829 mm av kompakt laminat. Utvändiga mått 1 008 mm x 1 829 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 227 kg. Maximal belastning (SWL): 232 kg. Vid 227 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 37,5 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 580 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarderna som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 15 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s



Product Varunummer	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdregerbar R8584572000
Ljudnivå	48 dB
Material Ergonomi	Pulver-lackerat rostfritt stål, liggyta i Compact Density Fiberboards (CDF). • Den ergonomiskt utformade sänggrinden har en praktisk nedre mittdel som ger vårdpersonalen bättre åtkomst och arbetsförhållanden vid förflyttning, omklädning och påklädning av användaren. • En sänggrind utan mellanrum där armar eller ben kan fastna eller glida ut om användaren rör sig oroligt på skiftbädden. Sänggrindens slutna utformning ger användaren som ligger på sängen en känsla av integritet. Sänggrinden har mjuka, rundade kanter så att den kan användas som stödhandtag. • Lätt att rengöra, med släta ytor där smuts och bakterier inte samlas.
Funktioner	• Inbyggda manöverknappar i vårdbritsen gör det enkelt att justera höjden. Du kan stå nära användaren som ligger på vårdbritsen, eftersom knapparna är placerade bekvämt nära hjälparen. Vårdbritsen kan även höjas och sänkas med hjälp av den sladdanslutna handkontrollen. • Lyfthöjd upp till 1 000 mm, vilket säkerställer en korrekt och ergonomiskt säker arbetshöjd för hjälparen. • Madrassen är vändbar, så att den kan vändas om den ena sidan blir sliten. • Den vändbara madrassen är fastsatt på vårdbritsen så att den inte förskjuts vid förflyttning av en orolig användare eller vid upp- och nedfällning av vårdbritsen.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Kontrollbox	CA63 Careline (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB30 (Linak) IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 420 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



PRESSALIT®

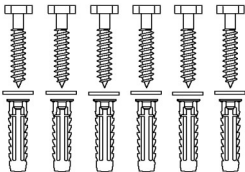
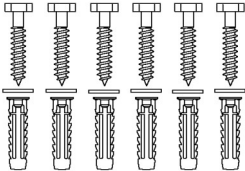
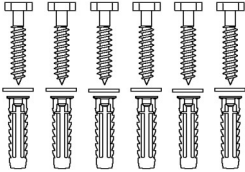
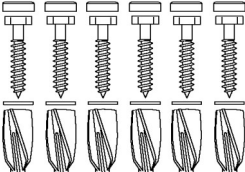
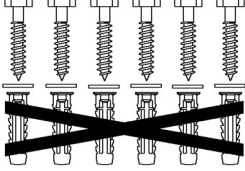
Product	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjddreglerbar
Varunummer	R8584572000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

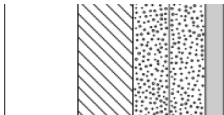
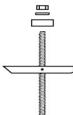
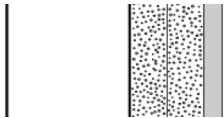
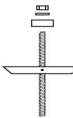
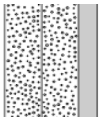
Product	CT 4000 vårdbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdreglerbar
Varunummer	R8584572000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 4000 vådbrits, manuell uppfällbar, elektrisk höjdglerbar R8584572000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com