


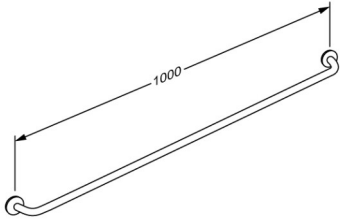

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS handgreep 1000 mm RT104035
<b>Kleur</b>	VVS: 777565535 NRF: 6317169 EAN: 5708590145952 HMI: 19085 NBS: N13:436 FDA: ILS/D135866 Rood (RAL 3003)
<b>Beschrijving</b>	 <p>PLUS toiletsteunen zijn hoogwaardige producten en kunnen op talloze manieren worden gecombineerd. De Plus toiletsteunen bieden de finishing touch voor het inrichten van een functionele en flexibele badkamer. Een betrouwbare oplossing met veel verschillende opties, welke eenvoudig de basis kan leggen voor meer onafhankelijkheid.</p> <p>PLUS handgreep, diameter 33 mm, lengte 1000 mm, voor vaste montage. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden. Inkl. muur rozet, die de bevestigingen bedekt. Materiaal: Gepoedercoat aluminium en kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 235 kg. Wanneer de handgreep wordt belast met 235 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 56 kg. <i>Handgrepen worden getest met een 1,5 veiligheidsfactor in overeenstemming met de eisen in ISO 17966:2016.</i>
<b>Materialen</b>	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycology kunststof
<b>Ergonomy</b>	Door de diameter van 33 mm kan de handgreep comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het eenvoudig om de handgreep vast te houden.




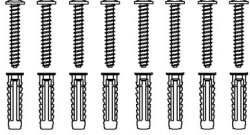
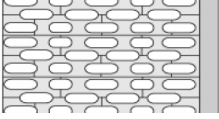
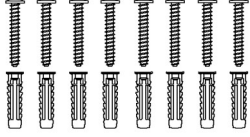
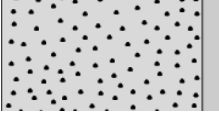
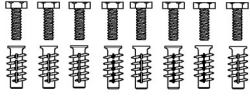
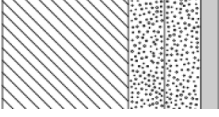
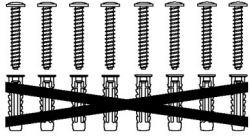


<b>Product</b>	PLUS handgreep 1000 mm
<b>Artikelnummer</b>	RT104035
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>








<b>Product</b>	PLUS handgreep 1000 mm
<b>Artikelnummer</b>	RT104035

## Installatie in verschillende wandtypes

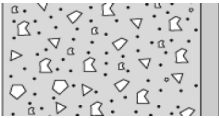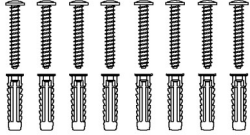	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hiz12</b> V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8666 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8616 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

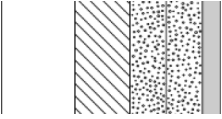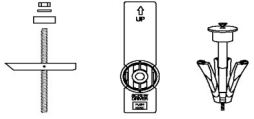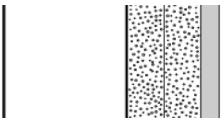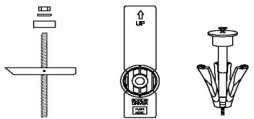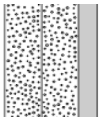

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS handgreep 1000 mm RT104035
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 