


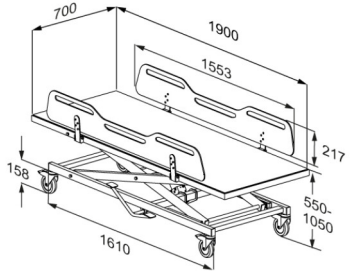

Product Artikelnummer	MCT 5 mobiel aankleedtafel, handmatig in hoogte verstelbaar R9502719000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS: 777542520 EAN: 5708590389875 HMI: 147813 FDA: INW/D546021</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>MCT 5 mobiele aankleedtafel, 700 x 1900 mm, twee uitklapbare zijpanelen. Handmatig in hoogte 500 mm verstelbaar, van 550 tot 1050 mm, met voetpedaal (hydraulisch) Matras apart te bestellen.</p>
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	500 mm
Product capaciteit	Maximale gebruikersbelasting (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 205 kg. <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 307,5 KG zoals de ISO 17966 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 1,5.</i>
Materialen	Plastic, Compact Density Fiberboards (CDF) en gepoedercoat staal.



Product Artikelnummer	MCT 5 mobiel aankleedtafel, handmatig in hoogte verstelbaar R9502719000
Ergonomy	<ul style="list-style-type: none">• De ergonomisch ontworpen veiligheidsrails hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, verschonen en aankleden van de gebruiker.• Met één hand te bedienen veiligheidsrails stelt de verzorger in staat om zowel oogcontact als fysiek contact met de gebruiker te houden gedurende het hele proces. De opvouwbare veiligheidsrails bieden ook eenvoudige toegang vanaf alle vier de zijden van de douche en aankleedtafel.• De uitgespaarde handgrepen in de veiligheidsrails stellen gebruikers in staat te helpen bij het draaien, wat fysieke training stimuleert.• Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.
Functie	<ul style="list-style-type: none">• De mobiele aankleedtafel kan van kamer naar kamer worden verplaatst voor eenvoudig transport en meerdere gebruikers.• Intuïtieve, gebruiksvriendelijke neerklapbare veiligheidsrails met bediening met één hand.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.



Product	MCT 5 mobiel aankleedtafel, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R9502719000
Reiniging	<p>Gebruik een vochtige, uitgewrongen doek en een mild zeepsop, zoals universele reinigingsoplossing, om het product te reinigen. Na het reinigen is het essentieel om het product droog te vegen met een droge, zachte doek. Deze stap is cruciaal om te voorkomen dat de materialen verkleuren. Daarnaast helpt het tegen slijtage van de verf op het oppervlak.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>