


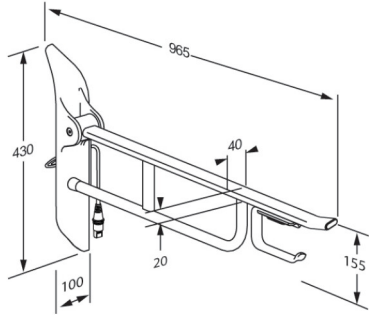

PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE toalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad R112685000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 615892600 NRF: 1617151 EAN: 5708590391083  VALUE och VALUE II toalettstöd med monteringsprofil är speciellt utformade för användning med SELECT TL5 toalettlyftare. Höjdjustering av den elektriska toalettlyften görs med hjälp av en manöverpanel som ingår i toalettstödet. VALUE toalettarmstöd med manöverpanel, 850 mm. Höjdreglerbart 150 mm. Uppfällbart. Vänster hand manövrerad. Monteringsprofil medföljer. Montering högersidig för brukar. Material: Stål med en Rilsan-belagd yta, gjuten aluminium. Exkl. monteringskruvar.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 150 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 120 kg
Material Ergonomi	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Monteringsprofil i gjuten aluminium. En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE ttoalettarmsöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad R112685000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Product	VALUE ttoalettarmstöd, 850 mm, med manöverpanel, vänster hand manövrerad
Varunummer	R112685000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026