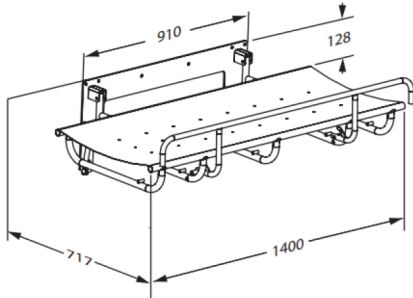




PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 1000 duschbrits, fast höjd R8406000
Färg	VVS: 777545340 EAN: 5708590294810 HMI: 88216 NBS: N13:40,375 FDA: INT/D124320 Vit
Beskrivning	 Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. SCT 1000 duschbrits, fast höjd. Uppfällbar. Inkl. sänggrind. Utvändiga mått: 747 mm x 1 400 mm. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal användarvikt (MUM): 150 kg. Maximal belastning (SWL): 150 kg. Vid 150 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 46 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 225 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Pulverlackerat rostfritt stål och PVC-överdragen kanvas (ftalatfri). Duschbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används. Den integrerade gascylindern gör det lätt att fälla upp liggplatsen så att den bara upptar minimalt med plats när den inte används. Sänggrinden är enkel att fälla upp/ner. Der finns ett duschdraperi till duschbritsen som skyddar vårdgivaren mot vattenstänk.



PRESSALIT®

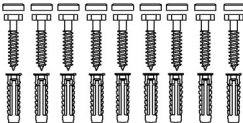
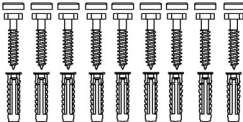
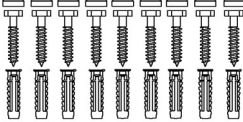
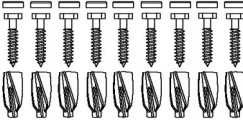
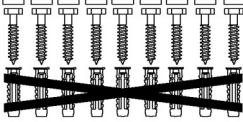
Product	SCT 1000 duschbrits, fast höjd
Varunummer	R8406000
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	SCT 1000 duschbrits, fast höjd
Varunummer	R8406000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8611 - Monteringsset 9 st. Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8611 - Monteringsset 9 st. Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8611 - Monteringsset 9 st. Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8661 - Monteringsset 8 st. bultar M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8611 - Monteringsset 8 st. skruvar Ø5 x 50, plugg SX8. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 1000 duschbrits, fast höjd R8406000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®