




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MSCT 4 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart R9504721000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777542630 EAN: 5708590389851 HMI: 147809 FDA: INW/D546021</p>  <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>MSCT 4 mobilt bruse/skifteleje, 700 x 2100 mm, fire nedfældbare sider. Manuelt højderegulérbart med fodpedal (hydraulisk). 500 mm højderegulering fra 550 til 1050 mm. Madras skal bestilles separat.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 250 kg. <i>Briksen er testet statisk med 375 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
<b>Materialer</b>	Kunststof, Compact Density Fiberboards (CDF) og lakeret stål.

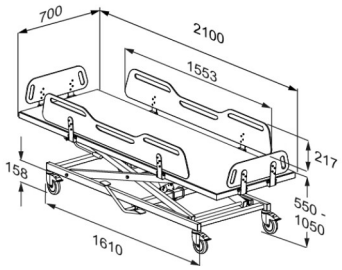

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MSCT 4 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart R9504721000
<b>Ergonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, skiftning og påklædning af brugeren.</li><li>• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet.</li><li>• De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når de vendes, hvilket motiverer fysisk træning.</li><li>• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.</li></ul>
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere.</li><li>• Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening.</li></ul>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



<b>Produkt</b>	MSCT 4 mobilt skifteleje , manuelt højderegulérbart
<b>Varenummer</b>	R9504721000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>