


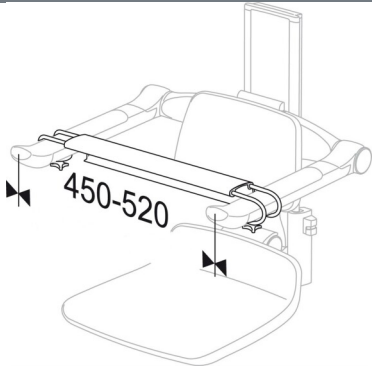

PRESSALIT[®]

Product Varunummer	Plus frontstöd, 450 - 520 mm RT873108
Färg	VVS:777539008 NRF:6317196 EAN:5708590314174 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Mörkblå (RAL 5011)
Beskrivning	 PLUS frontstöd finns i tre olika längder och flera färger, de kan användas antingen som front eller ryggstöd. PLUS frontstöd, 450 - 520 mm. Till PLUS duschsits 310 och PLUS toalettarmstöd
Produktkapacitet	Maximal belastning: 70 kg
Material	Stål och plast
Ergonomi	Stabiliserar och korrigerar användare med nedsatt kroppsbalans.
Funktioner	För personer med fysiska funktionshinder, särskilt de med begränsad överkroppsstyrka / bålstabilitet, eller de som lider av ofrivilliga rörelser eller kramper, det finns en mycket stor risk att falla framåt, ramla av toaletten. Till skillnad från remmar och bälten som kan pressas och kännas obekväma mot huden, är dessa justerbara främre stöd som fästs direkt mellan två PLUS toalettstöd eller mellan armstöden på ett PLUS duschstol. Frontstödet håller användarna säkert och bekväma på plats, vilket förbättrar deras trygghet, rörlighet och säkerhet. Samtidigt hjälper de vårdgivare att hålla användaren på plats och ge ökad trygghet.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	Plus frontstöd, 450 - 520 mm
Varunummer	RT873108
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com