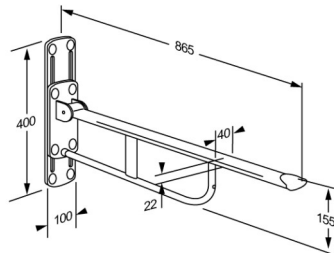




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur R1110000
<b>Couleur</b>	VVS:615722405 NRF:6191643 RSK:7972412 EAN:5708590176420 HMI: 25413 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Blanc
<b>Description</b>	 <p>VALUE barres de relèvement à fixation murale, rabattables, réglables en hauteur de 150 mm, longueur 865 mm. Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p> <p>VALUE barre de relèvement à fixation murale, rabattables, réglables en hauteur de 150 mm, longueur 865 mm. Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui. Matériaux : acier à revêtement Rilsan, aluminium moulé sous pression, matière synthétique. Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
<b>Réglage</b> <b>Hauteur de réglage</b>	Réglable en hauteur 150 mm
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale : 120 kg. Lorsque le barre de relèvement est chargé de 120 kg, chaque vis de montage est chargé de 86 kg.
<b>Matériaux</b>	La matière de base: Acier  La matière de surface: Rilsan  L'extrémité des barres: Nylon(PA)



# PRESSALIT®

<b>Article</b>	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
<b>Numéro article</b>	R1110000
<b>Ergonomie</b>	<p>Pour un appui optimal en position assise ou debout, et lorsqu'on se relève ou s'assied.</p> <p>Large surface pour poser le main et le bras, et forme arrondie pour une préhension stable et agréable.</p>
<b>Fonctions</b>	<p>Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace</p> <p>Réglable en hauteur de 150 mm.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



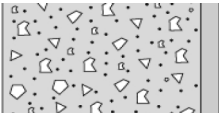
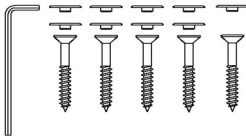

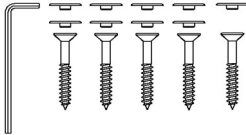
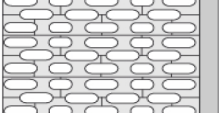
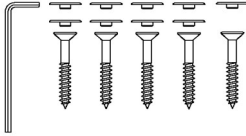
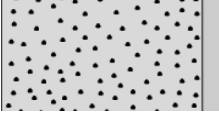
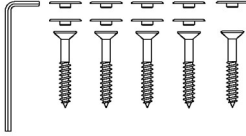
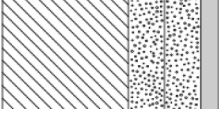
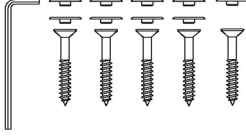
<b>Article</b>	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
<b>Numéro article</b>	R1110000
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Clinimax Difficil-S</li><li>Erisan OXY+</li><li>Sprit (husholdningssprit)</li><li>Suma Bac D10</li><li>Virkon</li><li>Rodalon Desinfektionsspray</li><li>Lysoformin Spezial</li><li>CaviCide</li><li>Sufanios Premium</li><li>Tvättssprit 70%</li><li>WipeClean UniversalCleaning</li><li>Chlorine Disinfection Wipes</li><li>Klorilli (Kiilto Clean)</li></ul> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Suma Star free D1</li><li>Taski 100</li><li>Taski 200</li><li>Milizid Citro</li></ul> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



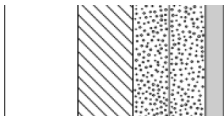
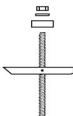

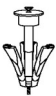
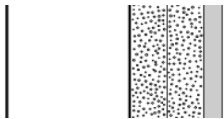
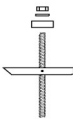

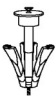
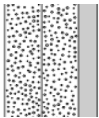

PRESSALIT®

Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1110000

## Installation dans de différents types de mur

	<p><b>Béton &gt;B25</b></p> <p>V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Brique pleine &gt;= Mz12</b></p> <p>V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Béton cellulaire P4</b></p> <p>V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	
	<p><b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b></p> <p>V8592 - 5 vis fraisées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément.</p>	



Article Numéro article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur R1110000		
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b> Vis de montage (5 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b> Vis de montage (5 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.