


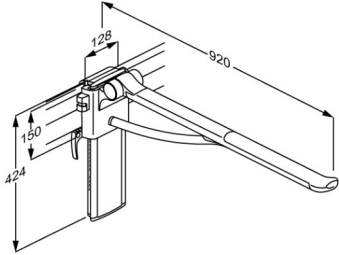

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, linkshandige bediening R391385000
<b>Kleur</b>	VVS:615883200 NRF:6191161 RSK:8487454 EAN:5708590368870 HMI: 125890 FDA: ILS/D135866 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>Alle PLUS toiletsteunen zijn voorzien van een geïntegreerd contragewicht, dat zorgt voor een gecontroleerde beweging tussen horizontale en verticale posities. Geschikt voor gebruik met closet welke een diepte vanaf de wand heeft van 700 mm.</p> <p>PLUS toiletsteun met veer. Totale lengte 920 mm, ergonomisch gevormd om een duidelijk einde aan de toiletsteun te geven. Linkshandige bediening. In hoogte 240 mm verstelbaar en zijwaarts verstelbaar zonder gebruik van gereedschap. Opklapbaar en afneembaar. Antraciete afdekplaat voor verticale wandrails. Materialen: de toiletsteunen zijn gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium, met een antislip-grip oppervlak gemaakt van zachte SEBS met een met glasvezel nylon kern Voor montage op horizontale PLUS wandrails (niet inbegrepen).</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b> <b>Product capaciteit</b>	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 240 mm Maximale belasting: 150 kg. Wanneer de toiletsteun belast is met 150 kg, wordt elke wandbevestiging in de horizontale wandrail belast met 44 kg. <i>PLUS toiletsteunen zijn statisch getest met 700 kg (dicht bij de muur), 425 kg (in het midden) en 225 kg (aan het uiteinde).</i>
<b>Materialen</b>	De toiletsteunen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De toiletsteun is tevens gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS-polymeer.



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, linkshandige bediening R391385000
<b>Ergonomy</b>	<p>De ovale vorm geeft een eenvoudig en comfortabel oppervlak om tegen te leunen en duwen.</p> <p>Het uiteinde van de toiletsteun is gebogen zodat het eenvoudiger is om jezelf vanuit een zittende positie naar voren te trekken en geeft ook een duidelijk einde van de toiletsteun.</p> <p>Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt.</p>
<b>Functie</b>	<p>Opklapbaar tegen de muur.</p> <p>De onderzijde is gemaakt voor de montage van diverse accessoires b.v. closetrolhouder.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



<b>Product</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, linkshandige bediening
<b>Artikelnummer</b>	R391385000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS toiletsteun, 850 mm, linkshandige bediening R391385000
	<p><b>Beoogd gebruik</b> De toiletsteun wordt gebruikt als ondersteuning voor het gaan zitten of opstaan van een toilet, of voor het zijwaarts verplaatsen vanuit een rolstoel.</p> <p><b>Operationele omgeving</b> Voor gebruik in een natte omgeving in huis, zoals een badkamer of een wasruimte in particuliere woningen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor institutioneel gebruik is de verwachte levensduur 10 jaar. <i>Levenscyclus test is uitgevoerd volgens ISO 17966:2016.</i></p> <p>Voor onderhoud raadpleeg de gebruikers handleiding, die bij het product is geleverd of via de website onder het kopje "Downloads".</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®