



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS 90° angle, barre d'appui 400 x 900 mm RT119000
Couleur	VVS:777567500 NRF:6311222 RSK:8980572 EAN:5708590146317 HMI: 25434 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Blanc
Description	 PLUS barres d'appui sont des produits de haute qualité, pouvant s'associer d'innombrables façons, pour parfaire l'aménagement d'une salle de bains fonctionnelle et flexible. Une solution de barres d'appui stable avec une profusion de combinaisons possibles pour faciliter le chemin vers l'autonomie. PLUS barre d'appui diamètre 33 mm avec angle 90°, gauche A : 400 mm. x B : 900 mm, pour montage fixe. Lorsque de la barre montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50 mm, distance idéale pour bien saisir la barre. Rosace murale, qui cache les vis de montage est incluse. Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique. Livré sans vis de montage.
Capacité du produit	Charge maximale : 235 kg. Lorsque le barre d'appui est chargé de 235 kg, chaque vis de montage est chargé de 56 kg. <i>Barres d'appui sont testé avec un facteur de sécurité de 1,5 selon les exigences de NF/ISO 17966:2016.</i>
Matériaux Ergonomie	Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cyclopy Collier: Nylon Diamètre de la barre: 33mm. La barre tient bien en main et permet une bonne préhension. Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.



PRESSALIT®

Article	PLUS 90° angle, barre d'appui 400 x 900 mm
Numéro article	RT119000
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.





PRESSALIT®

Article	PLUS 90° angle, barre d'appui 400 x 900 mm
Numéro article	RT119000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8667 - Kit vis de montage, 12 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	

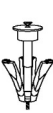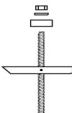

Article Numéro article	PLUS 90° angle, barre d'appui 400 x 900 mm RT119000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (12 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (12 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		