




<b>Article</b>	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
<b>Numéro article</b>	R5500000
<b>Couleur</b>	VVS:777531700 NRF:7501062 EAN:5708590328218 HMI: 130162 FDA: INN/D135865 Blanc
<b>Déscription</b>	 <p>PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm. Le siège est rabattable. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse). Les strapontins ne sont pas pour usage dans la zone de douche.</p> <p>PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur de 240 mm. Matériaux : aluminium, résine thermodurcissable, matière synthétique. Pour équipement de PLUS glissière-support verticale (non comprise)</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Hauteur de réglage</b>	240 mm
<b>Capacité du produit</b>	Poids maximum de l'utilisateur : 265 kg. Lorsque le siège est chargé de 265 kg, chaque vis de montage est chargé de 23 kg. <i>Les PLUS strapontin rabattable ont été testé statiquement avec un facteur de sécurité de 1,5, ce qui est exigé par les normes appliquées.</i>
<b>Materiaux</b>	Le strapontin est fait en résine thermodurcissable et en aluminium anodisé 10 microns. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.
<b>Fonctions</b>	Le strapontin rabattable, avec son siège ergonomique, est idéal quand on a besoin d'une place assise supplémentaire dans un espace réduit. Il s'agit typiquement de pièces où l'on peut avoir besoin de se reposer, par exemple la cuisine, l'ascenseur, un long couloir ou le coin habillage/déshabillage de la salle de bains.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

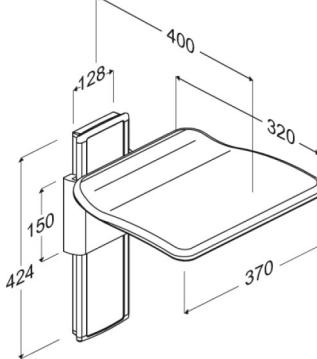

<b>Article</b>	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
<b>Numéro article</b>	R5500000
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Clinimax Difficil-S</li><li>Erisan OXY+</li><li>Sprit (husholdningssprit)</li><li>Suma Bac D10</li><li>Virkon</li><li>Rodalon Desinfektionsspray</li><li>Lysoformin Spezial</li><li>CaviCide</li><li>Sufanios Premium</li><li>Tvättssprit 70%</li></ul> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Suma Star free D1</li><li>Taski 100</li><li>Taski 200</li><li>Milizid Citro</li></ul> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b></p> <p>Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS strapontin rabattable, réglable en hauteur manuellement
<b>Numéro article</b>	R5500000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®