


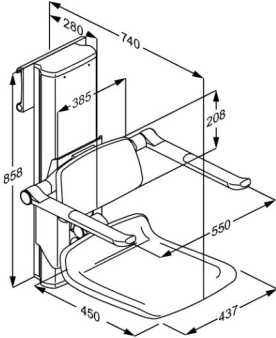

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart R7664277
<b>Farve</b>	Limegrøn
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>NRF:6317157 EAN:5708590360317 HMI: 124227</p>  <p>PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn.</p> <p>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>Eldrebet PLUS brusesæde 450, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm og manuelt sideværts regulérbart, armlæn kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige.</p> <p>Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeflader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige.</p> <p>Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højde- og sideværts regulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 35 kg.</p> <p><i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 2,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i></p>
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 10 mm/s Hastighed ned: 10 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB



<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R7664277
<b>Materialer</b>	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
<b>Ergonomi</b>	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
<b>Funktioner</b>	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug. Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejdshøjde, mens brugeren sidder på sædet. Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
<b>Styreboks</b>	SMPS14 (Linak) IPX6
<b>Håndbetjening</b>	HB3 (Linak) IP66
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R7664277
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Erisan OXY+ Tvåttspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring.</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS brusesæde 450, elektrisk højderegulérbart og manuelt sideværts regulérbart
<b>Varenummer</b>	R7664277

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®