


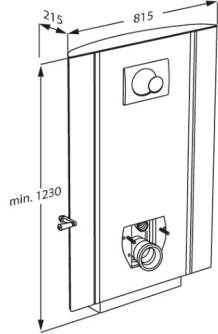

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer R8112112
<b>Kleur</b>	VVS:617991512 NRF:6191037 EAN:5708590345369 HMI: 105969 FDA:IKX/D319729 Antracietgrijs
<b>Beschrijving</b>	 <p>Het doel is om het voor gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken om bij dagelijks gebruik op en af het toilet te komen. Het doel is ook om het werk van de verzorgende te vereenvoudigen en het proces comfortabel en waardig te maken voor de gebruiker.</p> <p>SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem, 300 mm handmatig in hoogte verstelbaar, met hendel. Incl inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter. Wandcloset plus toiletzitting afzonderlijk te bestellen. Dankzij de geïntegreerde verticale zijprofielen, kunnen PLUS toiletsteunen worden toegevoegd. Voor vloerafvoer. Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen(PS) Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b> <b>Product capaciteit</b>	In hoogte verstelbaar 300 mm Maximale gebruikersbelasting: 200 kg. Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires). Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg. De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg.
<b>Materialen</b>	Geanodiseerd aluminium. De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS).De bovenplaat en compact laminaat. <i>Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.</i>



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer R8112112
<b>Ergonomy</b>  <b>Funktie</b>	<p>SELECT hoog-laag toiletsystemen zijn verkrijgbaar in die verschillende kleuren welke harmoniëren met moderne badkamers, wat resulteert in een comfortabele en fraaie toiletomgeving. Een minimum aan groeven, sleuven en openingen maakt het reinigen snel en effectief en resulteert tevens in een aantrekkelijk en exclusief ontwerp</p> <p>Het toilet kan omhoog en omlaag versteld worden met de draaihendel. Deze hendel kan aan weerszijden van het toiletsysteem worden geplaatst- zonder gereedschap. Het is mogelijk de hoogte van het toiletsysteem aan te passen door hoogte van boorgaten anders te positioneren als alternatief voor de draaihendel.</p> <p>Het toilet is 300 mm in hoogte verstelbaar, van 425 mm tot 725 mm, zodat de hoogte altijd perfect kan worden aangepast aan de behoefte van de gebruiker.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.




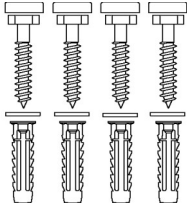
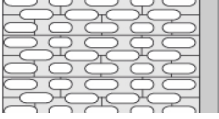
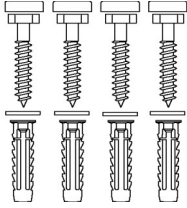
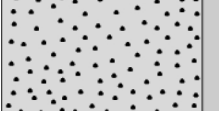
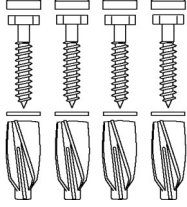
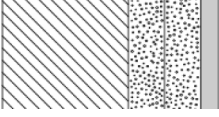
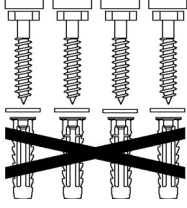


<b>Product</b>	SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer
<b>Artikelnummer</b>	R8112112
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>









<b>Product</b>	SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer
<b>Artikelnummer</b>	R8112112

## Installatie in verschillende wandtypes

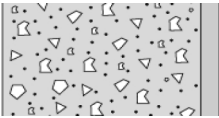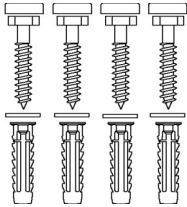	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=H12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

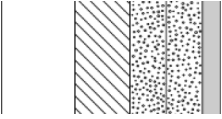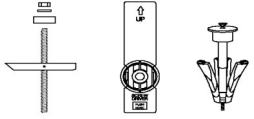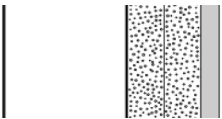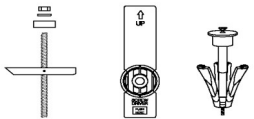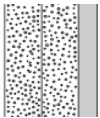

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	SELECT TL2 hoog-laag toiletsysteem met zijprofielen, voor vloerafvoer R8112112
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.