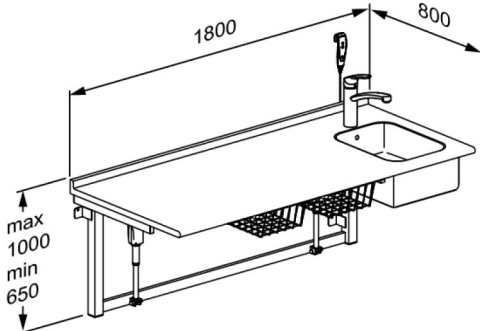




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8735000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777630330 NRF: 7501987 EAN: 5708590333786 HMI: 105715  Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Vägghängt skötbord med med vask, 800 x 1 800 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Laminat bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar. Material: Laminat och pulverlackerat stål. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	350 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s
Ljudnivå	48 dB



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8735000
Material	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: Laminat. Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

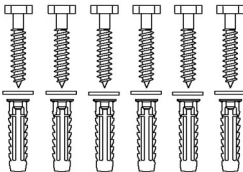
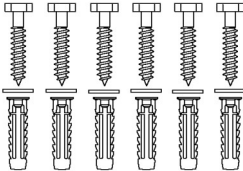
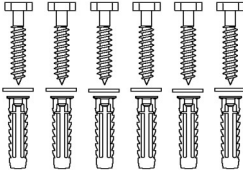
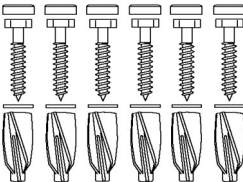
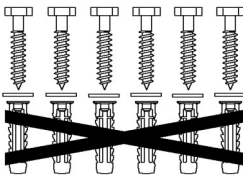
Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8735000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

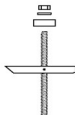
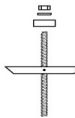
Product	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask
Varunummer	R8735000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdreglerbart, med vask R8735000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com