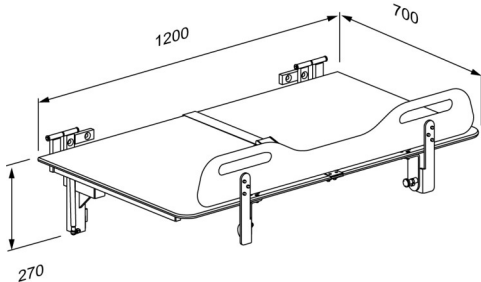




PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 5000 vårdbrits, fast höjd R8455512000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777540820 EAN: 5708590376585 HMI: 138135 FDA: INT/D124320  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. CT 5000 vårdbrits, liggyta i kompakt laminat, 700 x 1 200 mm , vit. Med sänggrind och kroppsbälte, uppfällbar, fast höjd, vägghängda.
Justerbar Höjdjustering	Fast höjd 0 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 150 kg. Maximal belastning (SWL): 150 kg. Vid 150 kg maxbelastning på vårdbritsen, belastas varje skruv med 52 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 225 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
Material	Pulver-lackerat stål, liggyta i Compact Density Fiberboards (CDF).



PRESSALIT®

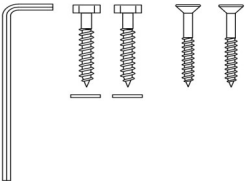
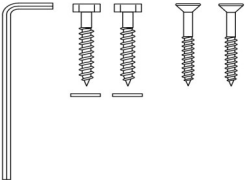
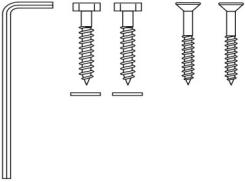
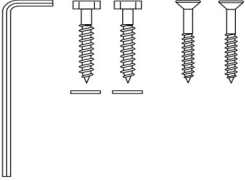
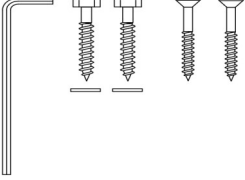
Product Varunummer	CT 5000 vårdbrits, fast höjd R8455512000
Ergonomi	Den ergonomiskt utformade sänggrind har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	Vårdbritsen kan fällas upp mot väggen så att den tar minsta möjliga plats när den inte används.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

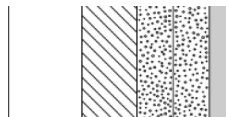
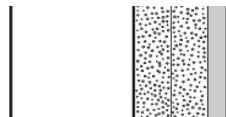
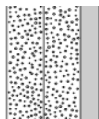
Product	CT 5000 vårdbrits, fast höjd
Varunummer	R8455512000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Mursten >= Mz12 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Cementsten >= Hlz12 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Lättbetong P4 Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä Monteringsset, 2 st. skruvar Ø10 x 70 och 2 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt	



PRESSALIT®

Product Varunummer	CT 5000 vådbrits, fast höjd R8455512000	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

Inkl. skruvar till vägg. Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekta pluggs användas. Se monteringsanvisning.

pressalit.com