


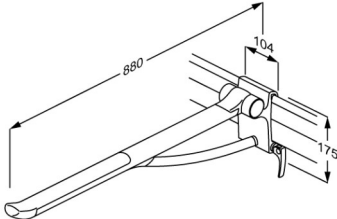

| | |
|--|--|
| Produkt Produktnummer | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient R381485112 |
| Farbe | <p>VVS:615881512 NRF:6191153 RSK:8487451 EAN:5708590368795 HMI: 123635 FDA: ILS/D135866 Anthrazitgrau</p>  |
| Produkt- beschreibung | <p>Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet.</p> <p>Geeignet für WC's mit einer Ausladung von 700mm oder bodenstehende WC's. <i>Ersetzt Auslaufmodell R3285.</i></p> <p>PLUS Stützklappgriff. Gesamtlänge 880 mm. Die Armlehne hat eine ovale form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Seitlich verschiebbar. Hochklappbar.</p> <p>Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).</p> |
| Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität | <p>Seitlich verstellbar</p> <p>240 mm</p> <p>Maximale Belastung: 150 kg. Wenn der Stützklappgriff mit 150 kg belastet ist, wird jeder Montageschraube in dem horizontalen Wandschiene mit 16 kg belastet.</p> <p><i>PLUS Stützklappgriffe sind mit einem Gewicht von bzw. 700 kg (nahe an der Wand), 425 kg (in der Mitte) und 225 kg (an der äußersten Punkt) statisch getestet worden.</i></p> |
| Materialien | <p>Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen.</p> <p>Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen.</p> <p>Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt.</p> <p>Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen.</p> |



| | |
|---|---|
| Produkt Produktnummer | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient R381485112 |
| Ergonomie Funktionen | <p>Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.</p> <p>Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt.</p> <p>Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinsteht bzw. aufsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.</p> <p>Der Stützklappgriff ist hochklappbar.</p> <p>An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren.</p> <p>Der Stützklappgriff ist mit einem integrierten Dämpfer ausgestattet. Mit Hilfe davon lässt sich der Stützklappgriff in einer ruhigen, gleitenden Bewegung hoch- und runterklappen.</p> |
| Garantie | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |



PRESSALIT®

| | |
|----------------------|--|
| Produkt | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient |
| Produktnummer | R381485112 |
| Reinigung | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> |



PRESSALIT®

| | |
|----------------------|---|
| Produkt | PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, rechtsbedient |
| Produktnummer | R381485112 |
| | <p>Verwendungszweck Der Stützklappgriff bietet Personen, die sich beim WC-Besuch hinsetzen, aufstehen oder sich seitlich vom Rollstuhl umsetzen, sicheren Halt.</p> <p>Betriebsbedingungen Zum Gebrauch in Nassräumen wie Badezimmern oder Waschräumen, zuhause, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Bei professioneller Verwendung beträgt die erwartete Lebensdauer 10 Jahre. <i>Die Lebensdauer wurde gemäß ISO 17966:2016 getestet.</i></p> <p>Für die Wartung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beigelegt ist und die ebenfalls auf der Webseite unter „Downloads“ gefunden werden kann.</p> |

pressalit.com

PRESSALIT®